

Bruksanvisning Hygiensits

Hygiensits artnr: 10 631



Hygiensits

Hygiensitsen är ett tillbehör till Bidette för att snabbt och enkelt rengöra sittytan på Bidette. Hygiensitsen fungerar också som ett extra stänkskydd då detta förlänger Bidettens vanliga stänkskydd med 35 mm. Hygiensitsen passar på Bidette R3, M3 och P12, alltså Bidetter tillverkade efter Juni 2009.

Användning

1. Fäll upp locket.
2. Placera Hygiensitsen ovanpå den vanliga toalettringen till Bidette.
3. Vid rengöring, lyft av Hygiensitsen, rengör, torka torrt och lägg tillbaka. Locket går att fälla ner även då Hygiensitsen ligger på sin plats.

Material: ABS plast med styrenskikt

Rengöring: Tvål och vatten, alkaliska rengöringsmedel, tvättsprit

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning. denna bruksanvisning art nr: 11036. 2012-03-15

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika tel: 0240 . 10102, fax 0240 . 10022
info@svancare.se , www.svancare.se

