

2020-04-09

Bruksanvisning Coxitläge och förhöjd sits på Lift

Förhöjd sits, art nr 10844

Om man vill använda Lift som en toalettförhöjare går detta bra. Lägsta höjden är då toalettporcelainets höjd + 65mm. Liften kan nu höjas till önskad höjd. Denna sits kan också användas som en vanlig toalettförhöjare till toaletten.

I denna artikel ingår:

Förhöjd sits 65 mm

Stänkskydd

2 st M8 x 50 skruv

2 st gängstänger med plastmutter, används om sitsen skall monteras på toaletten utan lift.



65 mm förhöjd fram och bak

Sittplåten plan, bakre fästen 30 mm

Coxit set, art nr 10849

Med Coxit set kan flera olika lutningar fås beroende på hur sitsen monteras.

I denna artikel ingår:

Förhöjd sits 65 mm

Stänkskydd

2 st M8 x 50 skruv

2 st M8 x 75 skruv

2 st 30 mm bakre distanser

2 st 55 mm bakre distanser



Coxit 4° eller 30 mm lutning

Sittplåten plan, bakre fästen 55 mm

Montering av förhöjd och coxit sits.

Hissa upp eller häkta av sittplåten så att det blir bekvämt att komma åt de båda skruvarna på undersidan som håller sitsen.


Ta bort den befintliga sitsen.

Montera fast den nya sitsen enligt som någon av alternativen



Coxit 9° eller 60 mm lutning

Sittplåten lutande, bakre fästen 30 mm

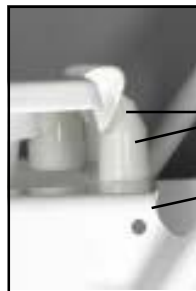

Plastkona

Distans 30 eller 55mm

Skruv underifrån
50 eller 80mm



Coxit 13° eller 90 mm lutning

Sittplåten lutande, bakre fästen 55 mm

