

## Bidette monterad på Lift

Bidette kan monteras på Lift. Bidette måste då anpassas för att passa Lift.

A. Om Bidette är beställd för att sitta på Lift är dessa anpassningar gjorda från Svan Care.

B. Om det är en redan befintlig Bidette som skall kompletteras med Lift måste vissa anpassningar utföras.

Art nr 11248  
Monteringssats Bidette Lift  
2 st M6 x 25 försänkta  
2 st hylsor ersätter lock  
2 st brickor M6 med gänga



Börja med att montera bort locket och ersätt detta med de båda hylsorna enligt *bild 1 & 2*. **Lift får aldrig ha en sits med fast lock, klämrisk!**

Montera bort de båda fasta skruvarna på bakbenen och ersätt dessa med de båda rostfria gängade brickorna, *bild 3 & 4*. Använd en segersäkringstång.

Vrid rätt de båda sidoflyttningsskydden enligt *bild 5*.

Montera sitsen på sittplåten enligt *bild 6*. Använd de båda M6 x 25.

Placera Lift över toaletten. Följ anvisningen i denna brochyr.

Montera upp fläkten på väggen. Fläktens översida ska vara 1000 mm över golvet. CC avståndet toalett - fläkt skall vara 430 mm



bild 1



bild 2

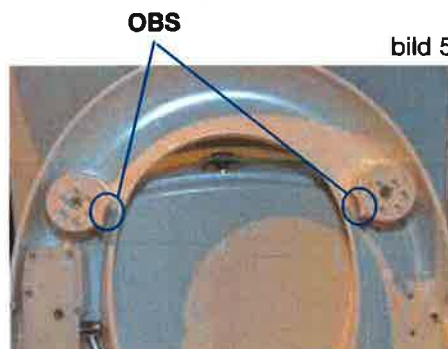


bild 5




bild 3



bild 4



bild 6

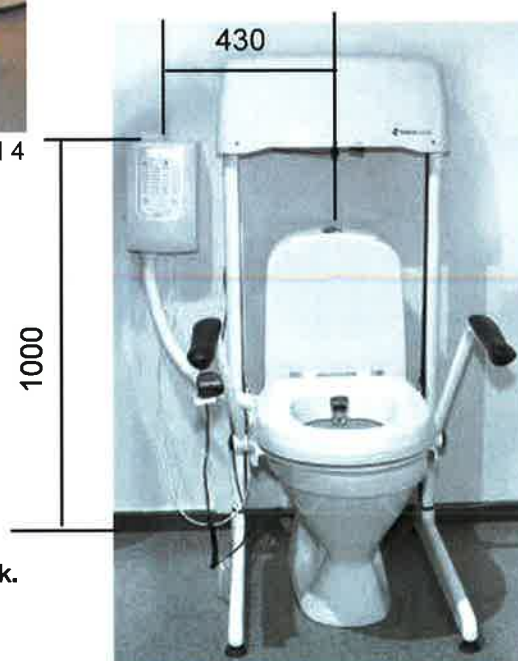

**OBS**  
Lift får **ALDRIG** monteras med toaletsits med lock.  
Endast löst speciallock får användas på Lift.