

## Krabat Pilot Krypvagn

Krabat Pilot är ett nyskapande kryphjälpmiddel. Traditionella kryphjälpmiddel ger inte barnet dynamisk hjälp att lyfta höften från golvet. Det gör Krabat Pilot med hjälp av en gaskolv.

När barnet får hjälp att lyfta höfterna är det lättare att få knäna under sig och därmed lättare att krypa. Krabat Pilot justeras individuellt för att ge rätt styrka i lyftet av höften.



Krabat Pilot är både ett hjälpmiddel för träning att komma till fyrfotstående, förstadiet till att krypa och ett förflyttningshjälpmiddel. Barnet får uppleva att det klarar att röra sig på egen hand och får samtidigt god träning.

Den lyfthjälpen barnet får kan ändras efter barnets vikt och utveckling av egen funktion genom att gaskolven justeras i höjd. Höjden kan ändras så att Krabat Pilot passar för barn med olika storlek. Krabat Pilot passar för barn ca 1-5 år. Det är en fördel att börja tidigt då barnet är motiverat att komma till fyrfotstående och att krypa.



Krabat Pilot har steglös höjjustering, tre olika lägen för gaskolven och fyra fasta lägen för justering av bålstödet längd. Detta provas ut för barnet och justeras då barnet växer och krypförmågan utvecklas.

Krabat Pilot har fyra hjul. Den svänger lätt så att barnet kan krypa dit det vill. Det är enkelt att lyfta barnet i och ur hjälpmidlet. Barnet är inte fastspänt i hjälpmidlet, men en del barn kan behöva ryggrem och positionerande knäskyddet Co-Pilot. En rem över barnets bakdel kan användas och ingår som standard. Barnet kan röra sig relativt fritt, vilket är viktigt för att det ska kunna utveckla rörelser och trivas.

Krabat Pilot har en skyddskåpa av slagtåligt plastmaterial. Det är utformat så att fingrarna inte kan klämmas under hjulen och som skydd mot att välta. Den är lätt att rengöra. Krabat Pilot har en modern och funktionell design. Den har en kompakt form och låg vikt, för att vara lätt att ta med sig.



Försäljning i Sverige:  
Svancare AB  
Alvägen 1, 771 41 Ludvika  
[www.svancare.se](http://www.svancare.se)

Tillverkare:  
Krabat AS  
Hvalstad, Norge  
[www.krabat.no](http://www.krabat.no)

## Tillbehör

### Krabat Co-Pilot Knäskydd

Knäskydden Co-Pilot är utvecklade för att positionera och ge lagom friktion så knäna får grepp mot underlaget. Friktionen behöver vara måttlig så att barnet både kan skjuta ifrån och få med sig knäna när det kryper framåt. Barn som har svårt att hålla benens position får hjälp genom de elastiska remmarna som kan justeras mellan knäskydd och krypvagn och som dessutom hjälper barnet till ett reciprokt rörelsemönster. De passar barn från ca 9 månader.


### Bålband

En elastisk rem över ryggen ger extra säkerhet för livliga barn.

### Väst

För barn som tar mycket fart och glider framåt kan en väst hjälpa till att hålla barnet i rätt position.

## Tekniska data

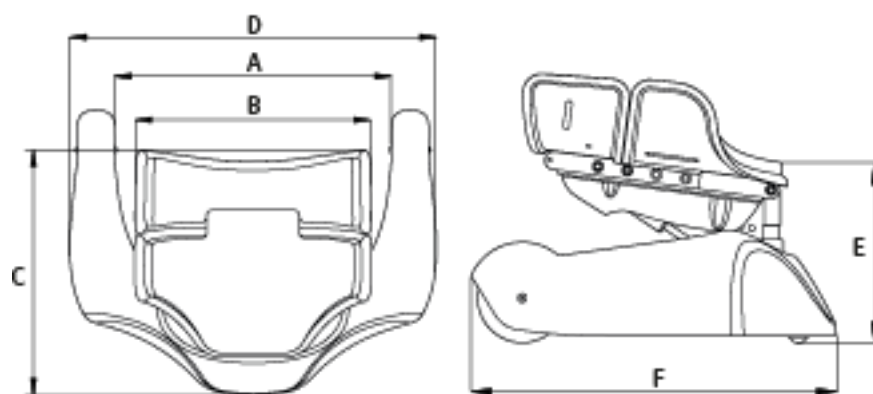

<b>A</b>	Invändig bredd	30 cm
<b>B</b>	Bålstöds bredd	25 cm
<b>C</b>	Bålstöds längd	21-28 cm
<b>D</b>	Total bredd	39 cm
<b>E</b>	Höjd	15-21 cm
<b>F</b>	Total längd	31 cm
	Vikt	1,9 kg
	Max brukarvikt	25 kg
	Ålder	Från ca 9 mån