

Toalettsits KAN Standard Art. nr. 10 041



Läs **Montering och bruksanvisning** före
montering och användning av **Toalettsits KAN**.
Spara manualen för framtida bruk.



Toalettsits KAN Standard



Produktbeskrivning

Toalettsits **KAN Standard** passar till de flesta toalettstolar och har en slät, rund sittyta. Har förstärkta fästen i metall (alt. med förstärkta pinnskruvar i metall) för att ge en säker montering vid kombination med Balance.

Passar till toaletter med genomgående fästhål och med ett avstånd mellan

fästhålen på 130 - 180 mm.

KAN Standard kan kombineras med Balance.

Kan även kombineras med:
Hålförminskare 10046, 10047, 10049 och 10050.

Mjuksits 10398 och 10399.

SVAN CARE AB

Alvägen 1
771 41 LUDVIKA, Sweden



Tel: 0240-101 02, fax: 0240-100 22
info@svancare.se
www.svancare.se

Rengöring

Vid behov rengör produkten med tvål och vatten. Använd 70% tvättsprit vid behov.

Rekonditionering

Plocka isär hela produkten. Sitsen tvättas rent med tvättmedel, sköljs med vatten och torkas. Desinfektera. Övriga delar rengörs på samma sätt, alternativt med vagndiskdesinfektor eller liknande utrustning. Kontrollera samtliga delar efter slitage, byt ut vid behov.

Material, miljö och källsortering

Sitsen har en kärna av träfiber med ett överdrag av glasfiberarmerad polyester som är lackerad. Sits skickas till förbränning eller återvinning. Beslag av metall. Metalldelar skrotas.

