

2020-04-08

Bruksanvisning Löst Toalettlock till Lift artnr:10871

(denna bruksanvisning art nr:10858)

Om Bidette är monterad på Lift används istället locket med artnr:11278.
Samma instruktioner gäller för detta lock.



Detta lock skall användas till Lift, och är gjort så att det ska läggas löst uppe på sitsen. Det skall lyftas av och placeras på golvet/på sidan av Lift när det inte används.

Locket tål normal belastning, att sitta på.

Användningsområde:

Toalettlocket är avsett att fungera som ett vanligt toalettlock till produkten Lift (toalettlift), med den skillnaden att det inte får fällas upp utan måste tas bort helt då toaletten skall användas. Skulle locket fällas uppåt och bli stående, lutande mot toalettens vattentank finns en klämrisk mellan locket och underdelen på Liftens övre balk, då man höjer upp sitsen.

Max belastning: sittandes 160 kg. Man får ej stå på locket.

Rengöring/Rekonditionering:

Locket rengörs med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel och tvättsprit vid behov.

Material och källsortering: Material: ABS plast. Källsortering: brännbart.

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

