


Krabat Runner

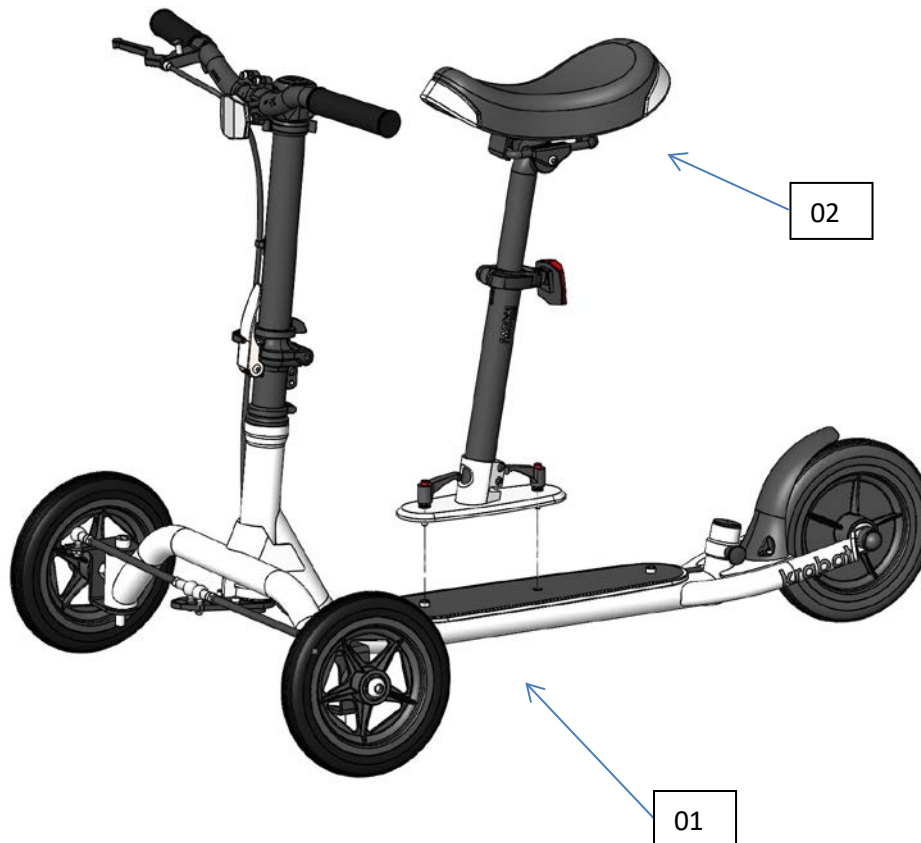

Bruksanvisning och monteringsanvisning

B-02 – Krabat Runner – Bruksanvisning

- 01** Krabat Runner
- 02** Sadel, komplett

Nödvändiga verktyg:


För att justera sittedjup eller sittvinkel används en 4mm insexnyckel.

Viktigt: Fäst skruvar och handtag noggrant.

Monteringsanvisning:


Styre:

1. Vinkla upp styret till upprätt position.
2. Roter handtaget uppåt för att låsa styret i position.
3. Roter säkerhetspärren för att låsa handtaget.

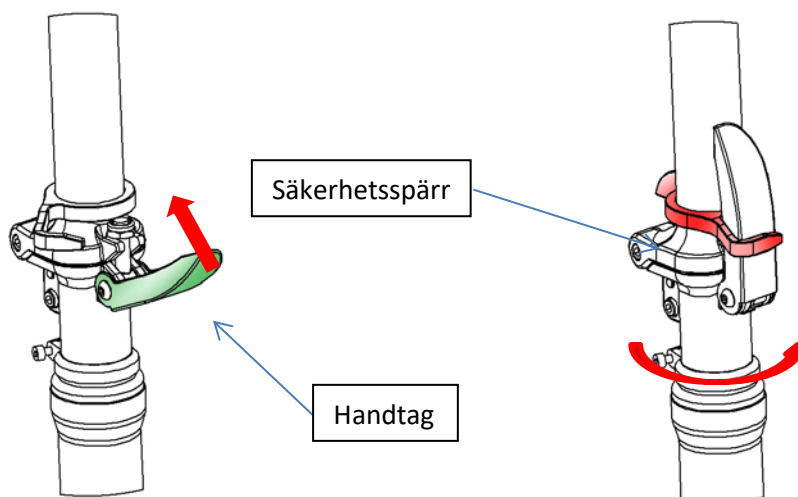

Notera: Säkerhetspärren skall alltid vara låst när Krabat Runner används!


4. Styret justeras i höjd genom att lossa spännet, flytta styret till önskad höjd och spänn.

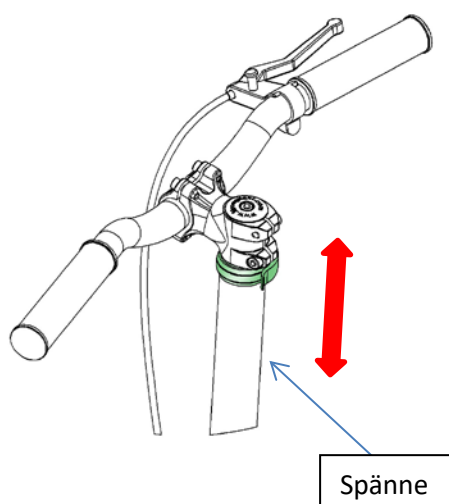


Sadel:

5. Placera sadeln i önskad position, främre eller bakre. Placera skruvarna med spännhandtag i de gängade hålen och dra åt noggrant. För att förhindra att handtagen är i vägen ska de lyftas och roteras inåt som bilden nedan visar.

Främre position


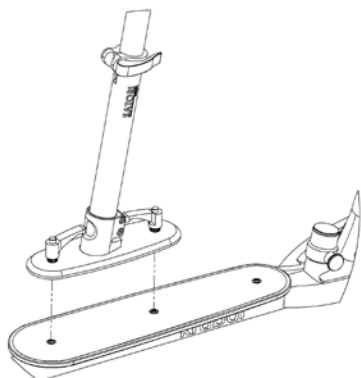


Bakre position

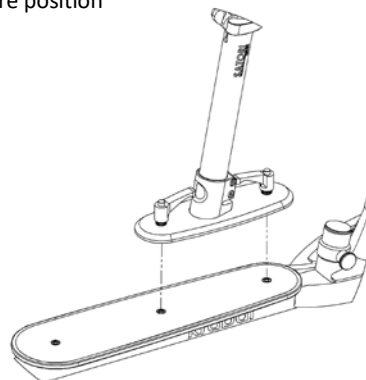


Justering av sadel:

6. Höjjustering: Lossa klämman, justera sadel till önskad höjd och spänn klämman.
7. Djupjustering / vinkeljustering: Lossa de två skruvarna (en på var sida), flytta sadeln till önskat position och spänn noggrant.

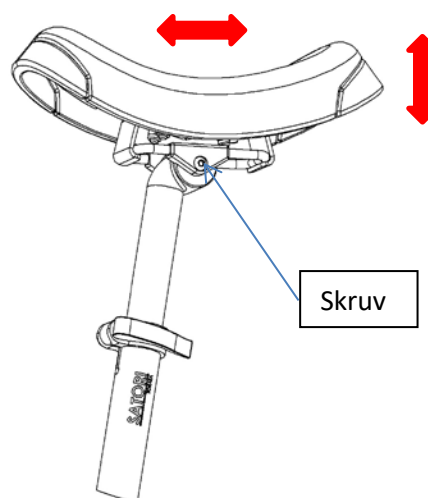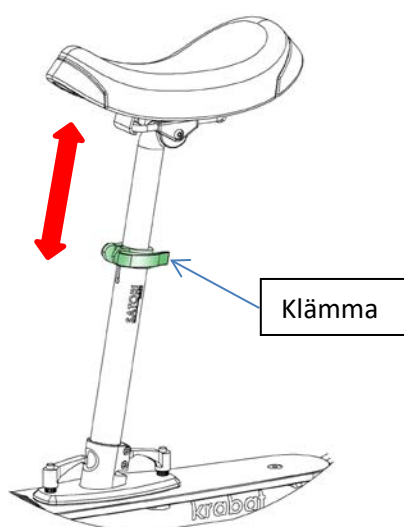

Påskjuthandtag (tillbehör):

Krabat Runner kan kompletteras med en påskjuthandtag. Denna kan eftermonteras vid behov.

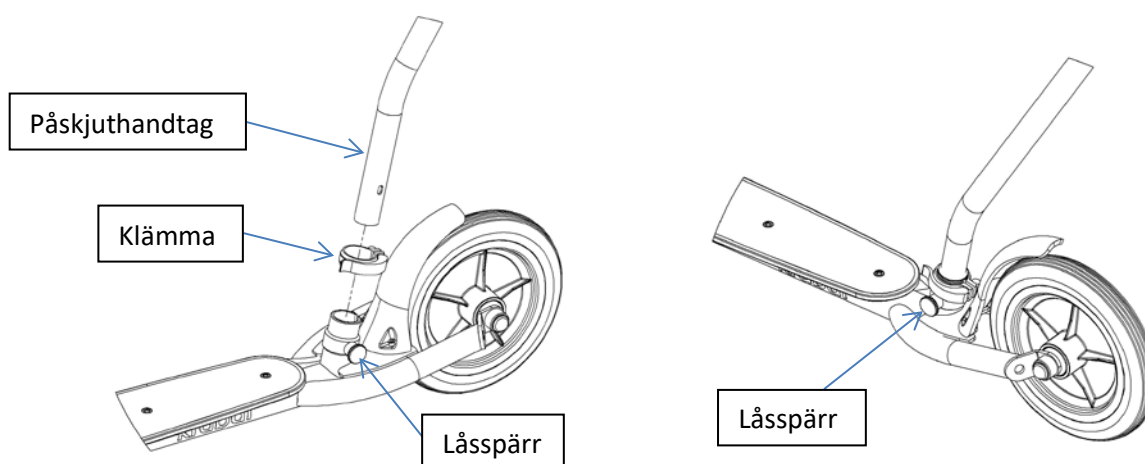


8. Ta bort proppen som är monterad i röret för påskjuthandtag.
9. Trä klämman över röret på Krabat Runner som visas i bilden ovan.
10. Dra ut låsspärren och skjut ned påskjuthandtag helt i röret. Se till att låsspärren klockar i lås innan klämman dras åt.


Notera: Påskjuthandtaget ska alltid låsas med låsspärren för säkerhet.

Broms - Parkeringsbroms:

Krabat Runner är försedd med en kombinerad broms/parkeringsbroms.

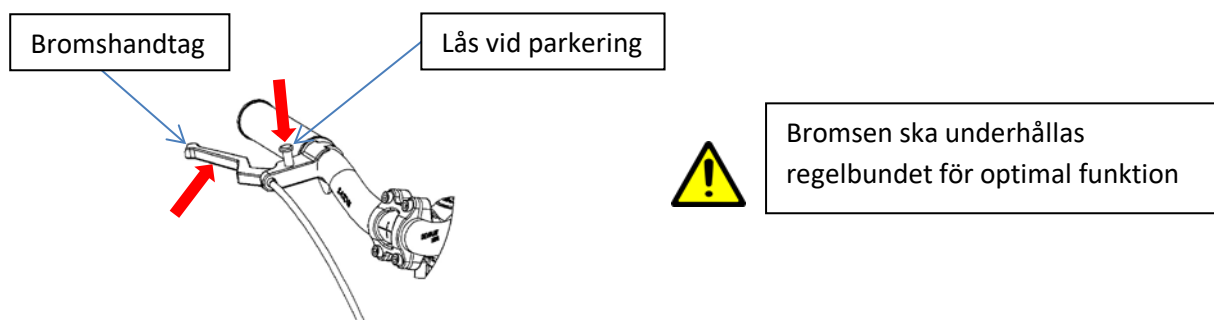

11. För att använda parkeringsbromsen trycks bromshandtaget in och därefter trycks låsknappen in.

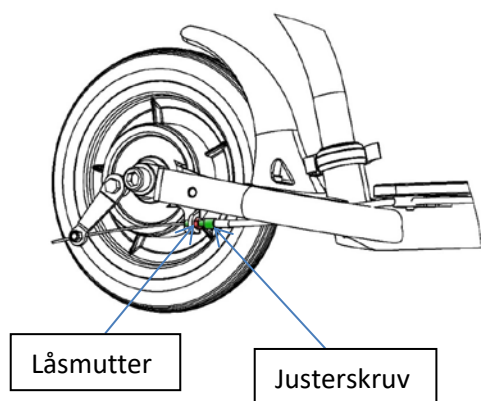

Bromsen ska underhållas regelbundet för optimal funktion

12. För att justera bromsvajern lossas låsmuttern och därefter kan bromsvajern spännas. Spänn låsmuttern.


Allmänt:



- Maximum brukarvikt: **35 kg!**
- Krabat Runner är inte en leksak. All användning skall ske under vuxens tillsyn!
- Krabat Runner skall inte köras snabbare än 5 km/h!
- Olyckor kan ske. Använd därför alltid hjälm och annan nödvändig skyddsutrustning.

Extra:

Det går att fästa en draglina i Krabat Runner, denna fasts i fästpunkten på styrets främre del.

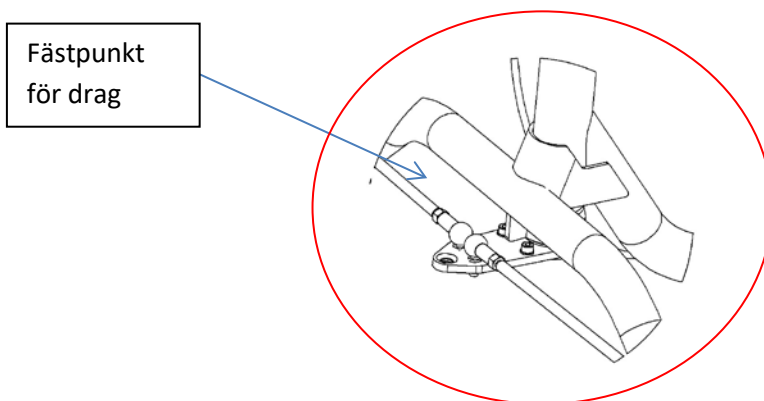

SÄKERHET

Alla Krabat produkter är CE märkta enligt 93/42/EEG, Klass 1, 14 Juni 1993 - säkerhets- och funktionskrav som ställs på medicintekniska produkter. Denna bruksanvisning är godkänd enligt denna standard.

Produktens livslängd beräknas till 5 år vid normalt bruk. Efter denna tid kan produkten renoveras av Krabat AS eller annan godkänd partner för att förlänga livslängden. All service och underhåll ska utföras av Krabat eller auktoriserad partner

Produkter med elektriska komponenter ska gås igenom tekniskt av Krabat AS innan de får återanvändas.



CE-märkningen ska tas bort om produkten modifieras eller delar används som inte är original.



Justeringar som inte finns beskrivet i bruksanvisning får endast utföras av Krabat eller person godkänd av Krabat.



Krabat produkter är inte leksaker. Olämpligt handhavande kan skada såväl användare som produkt.

GARANTI

Krabat 2 års garanti på alla produkter. Garanti gäller brister i utförande eller material. Garantin kan begränsas vid brister i service och underhåll. Det är kundens ansvar att underhåll utförs.

Garantin täcker inte skada uppkommen på grund av oaksamhet, felaktig användning eller brist på underhåll. Garantin täcker inte normalt slitage eller förbrukningsdetaljer.

Garantin upphör att gälla om icke-originaldelar används eller om produkten repareras eller anpassas av personer som inte är godkända av Krabat.

ÅTERFÖRSÄLJARE, SVERIGE

Svancare AB, Alvägen 1, 771 41 LUDVIKA
www.svancare.se

