



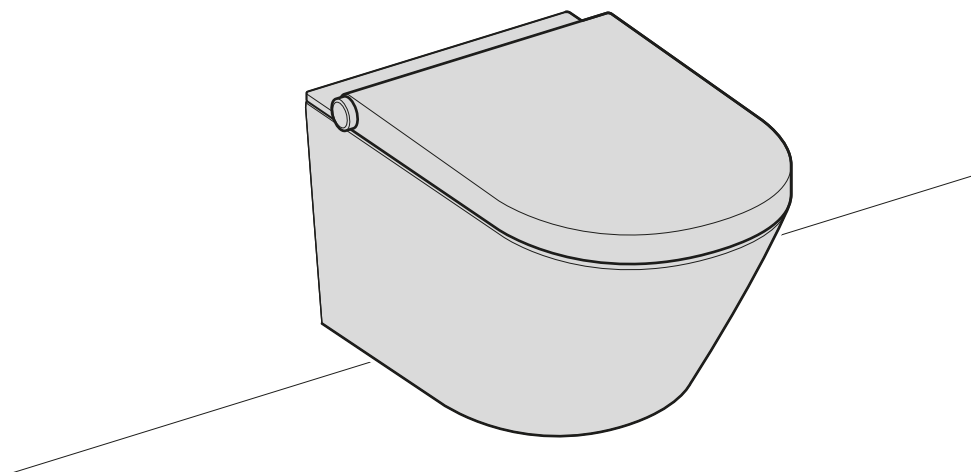

Läs **Installationsanvisning** och **Bruksanvisning** före installation och användning av **Bidé Elegant**.  
Spara manualerna för framtida bruk.

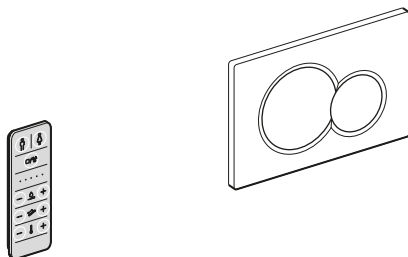

**Bidé Elegant** (standardutrustad)

## Distributör

Svan Care AB  
Alvägen 1  
771 41 Ludvika  
Sweden  
www.svancare.se

## Symboler i installationsanvisningen



**Försiktighet:** Symbolen indikerar att försiktighet bör tas för att förhindra patient- eller personskada och/eller försämring av utrustningen.



**Varning:** Varningssymbolen indikerar en potentiell fara som, om den inte undviks, kan innebära allvarlig patient- eller personskada.



För att undvika risk för elektrisk chock får **Bidé Elegant** endast anslutas till ett nätuttag med skyddsjord.



**Bidé Elegant** får inte öppnas eller repareras av obehörig. Kontakta tillverkaren eller din distributör för hjälp med service.


**Bidé Elegant** får inte modifieras utan tillstånd från tillverkaren.

**Bidé Elegant** får inte användas samtidigt som den repareras eller underhålls.



Läs medföljande bruksanvisning.


## Innehåll, Bidé Elegant

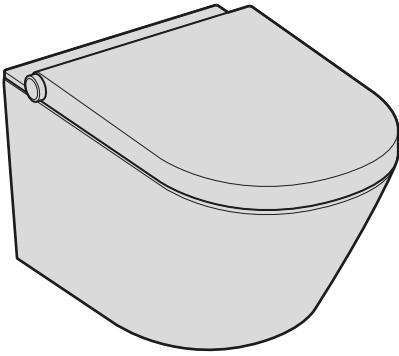


Bidé Elegant




Handkontroll

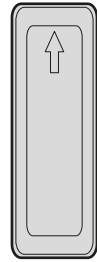


Hållare  
(handkontroll)

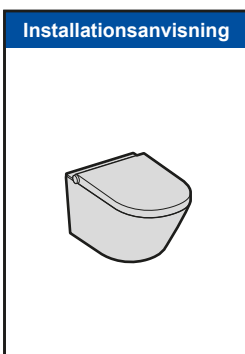

Installationsanvisning

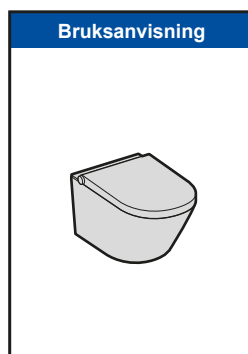


Bruksanvisning

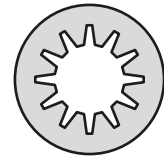


Gummitätning/  
strykning av vattenflöde



Vattenslang

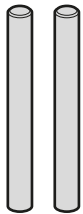

Skruv M12 (2x)

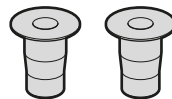


Hylsa (2x)




Bricka (2x)




Mutter M12 (2x)

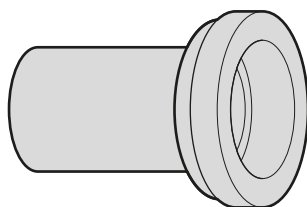

Avloppsrör med tätning

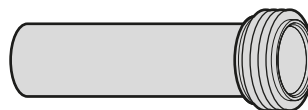

Spolrör med tätning

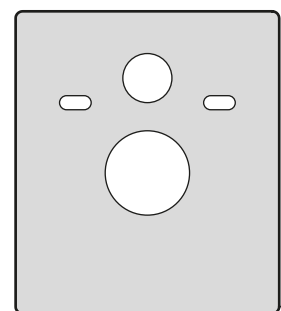


Skyddsduk

## Reservdelar, Bidé Elegant

Benämning	Artikelnummer
Sits utan porslin	15 502
Vattenfilter	15 503
Luftfilter	15 504
Handkontroll	15 505

# 1 Förberedelse innan installation av **Bidé Elegant**

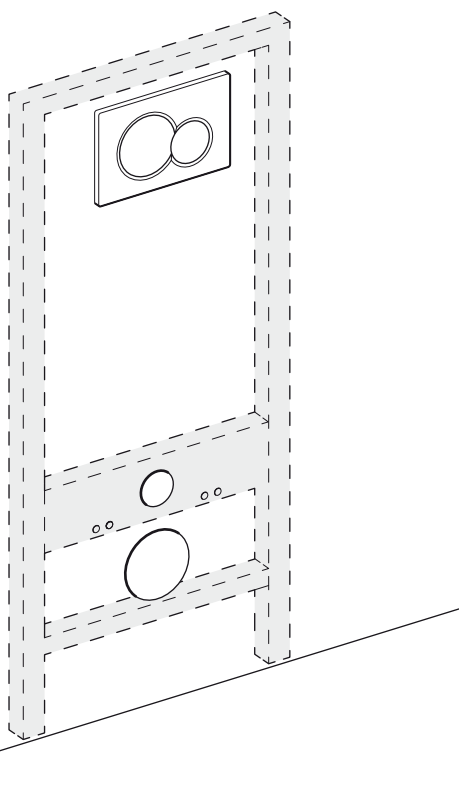


## Notera!

Inbyggnadsfixtur för vägghängd toalett krävs innan montage av **Bidé Elegant**.


## Notera! Installation A

El och vatten till **Bidé Elegant** anslutes på väggen utanför inbyggnadsfixturen. El anslutes med fast installation eller stickkontakt (100-240 VAC, 50/60 Hz). Starta installation A av **Bidé Elegant** fr.o.m. bildruta 2 (sidan 5).

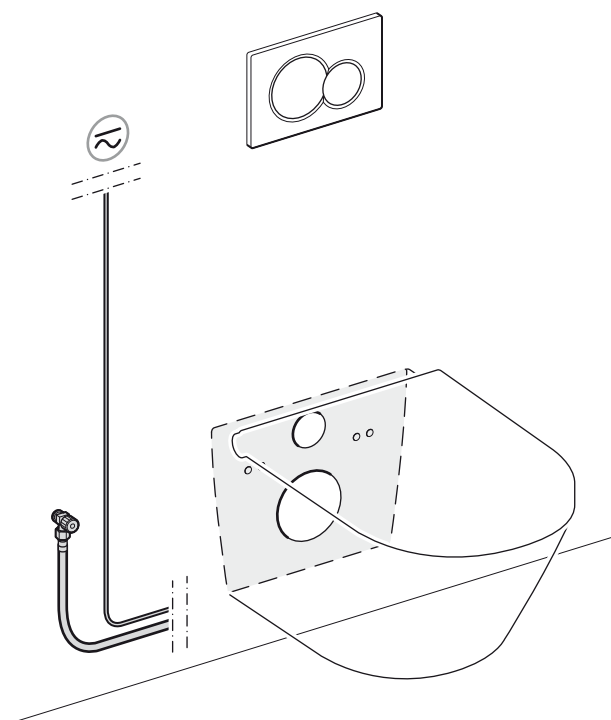


## Notera! Installation B


El och vatten till **Bidé Elegant** anslutes i väggen bakom toaletten. El anslutes med fast installation (100-240 VAC, 50/60 Hz). Starta installation B av **Bidé Elegant** fr.o.m. bildruta 27 (sidan 11).

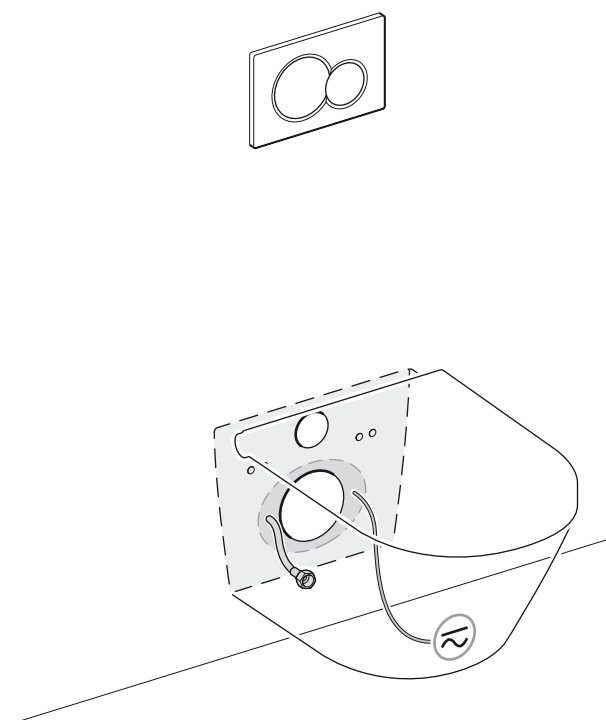


2

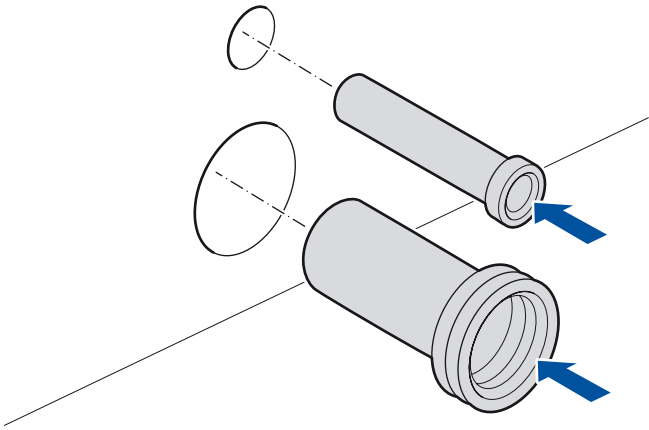


3

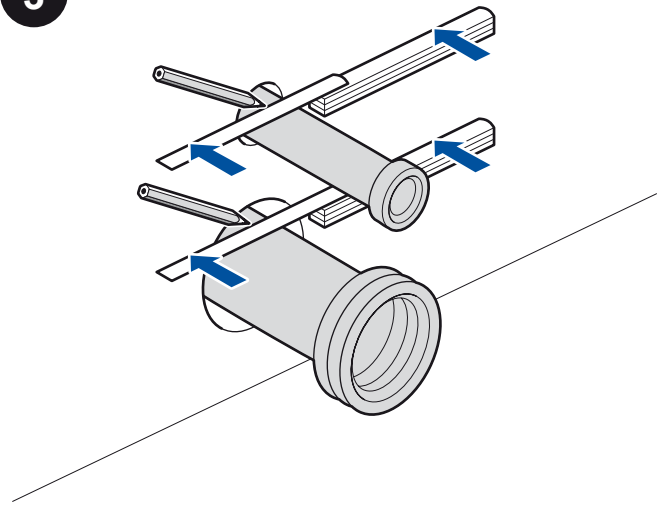

4

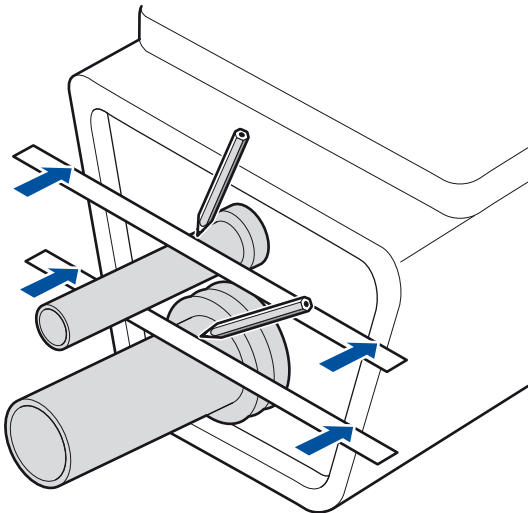


5

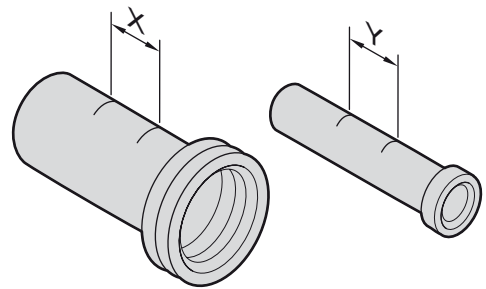


Installation A


6

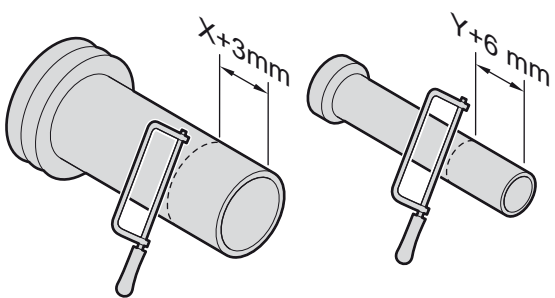


7

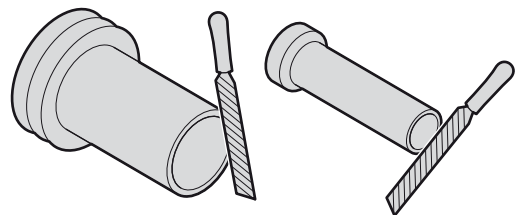


8

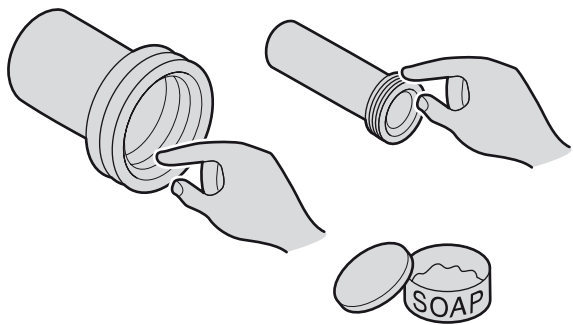


9

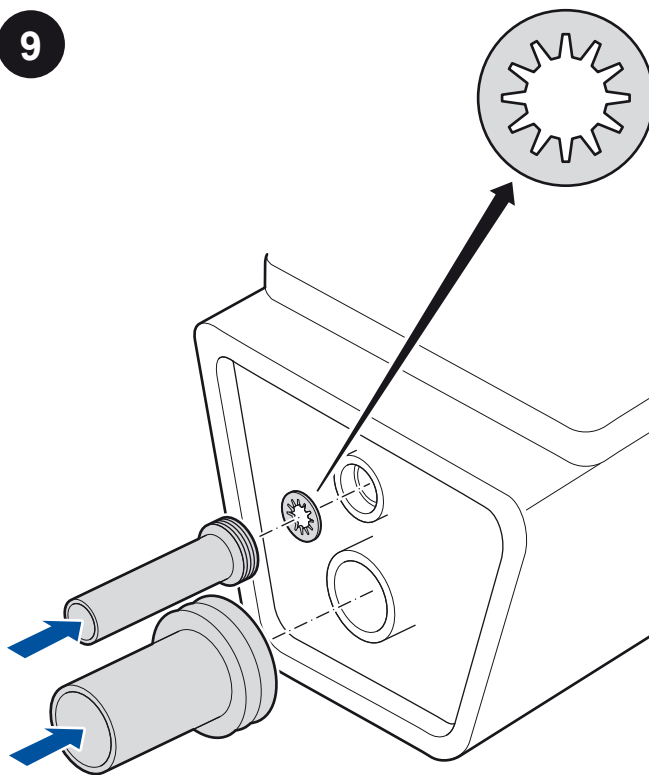

10

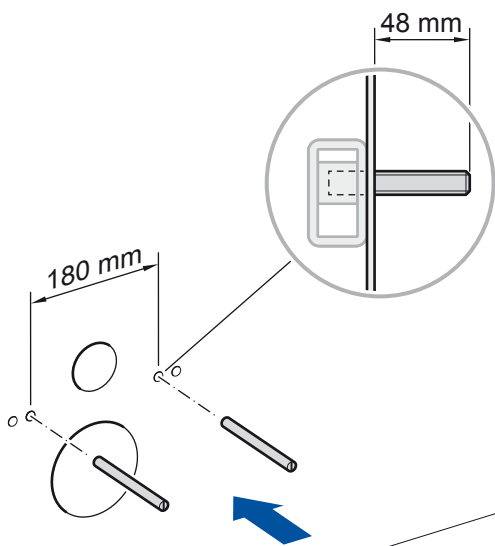


11

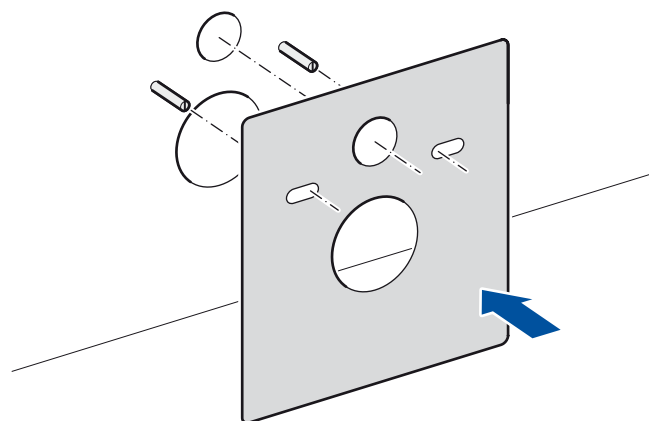


Installation A


12

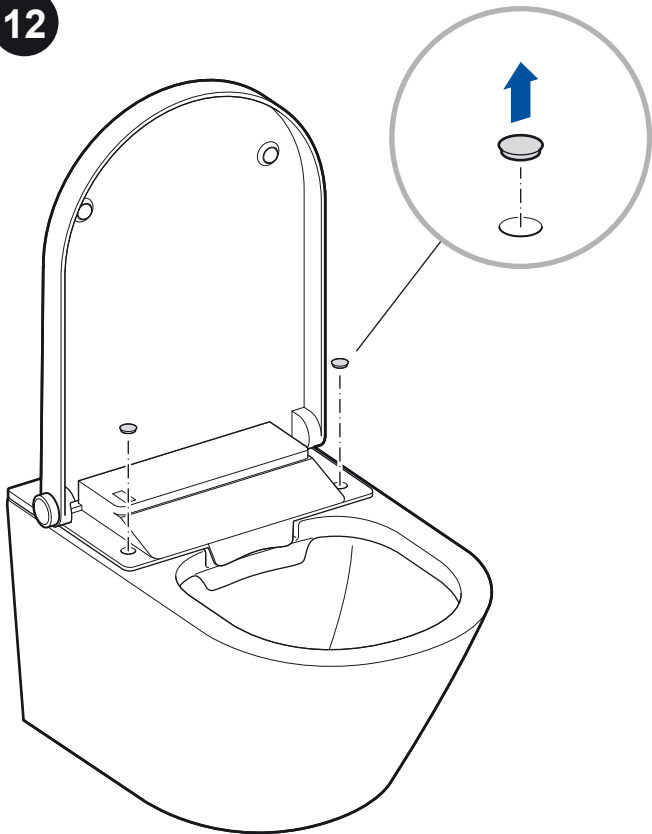

13

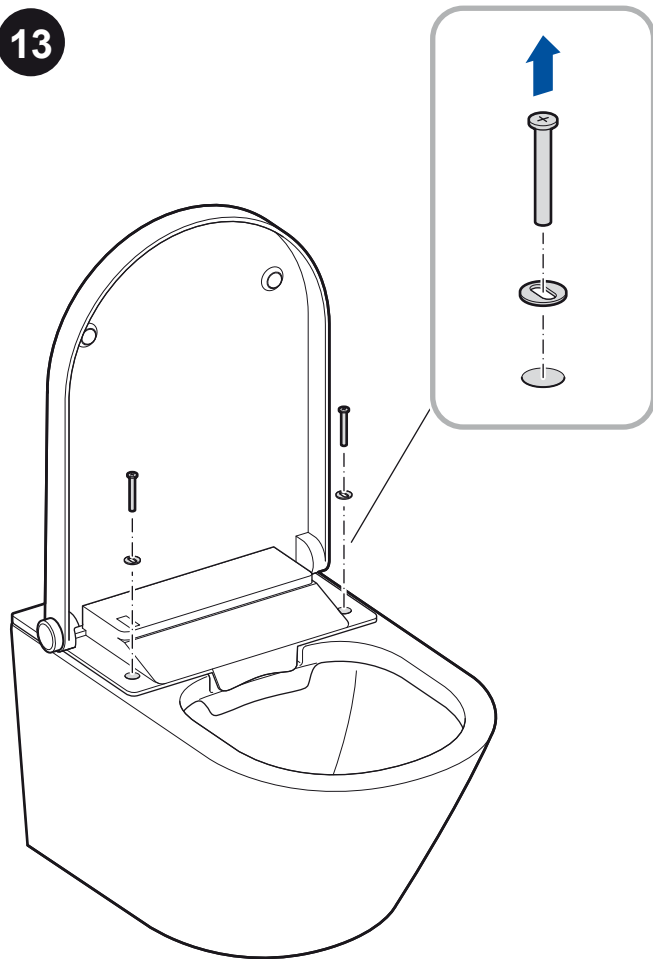


14

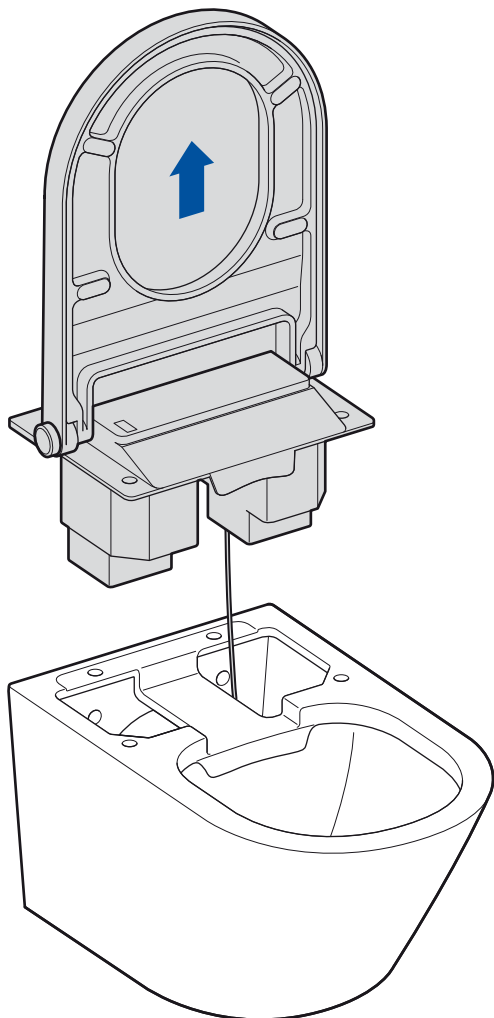


15

**Notera!**  
Smörj spolrör och avloppsrör med fett innan montering.

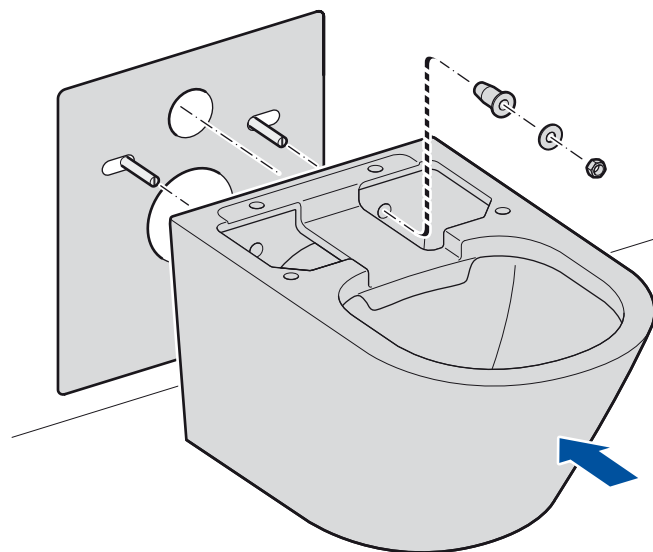


Installation A


16

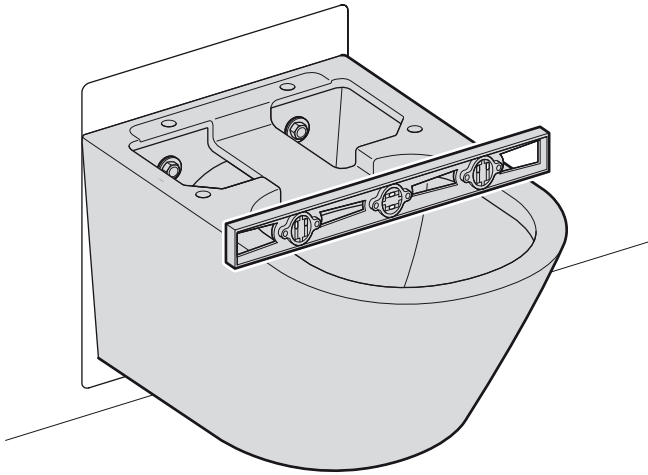


17

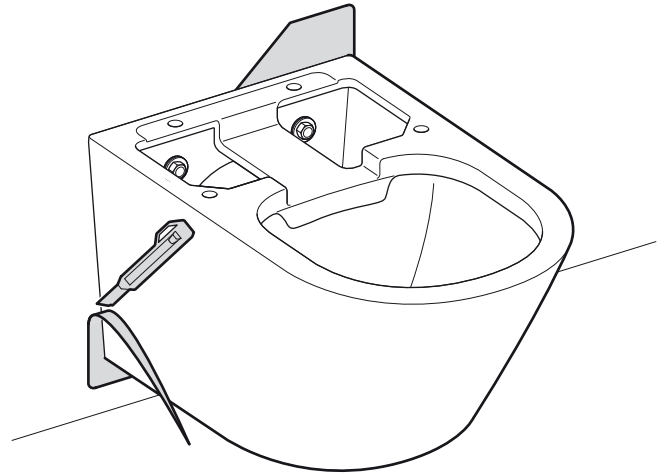

18

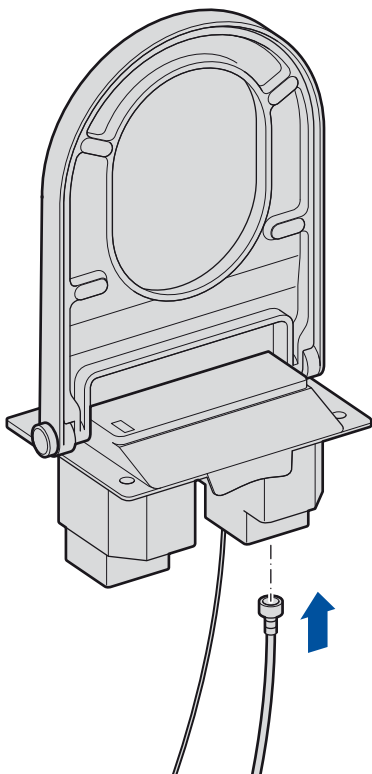


19

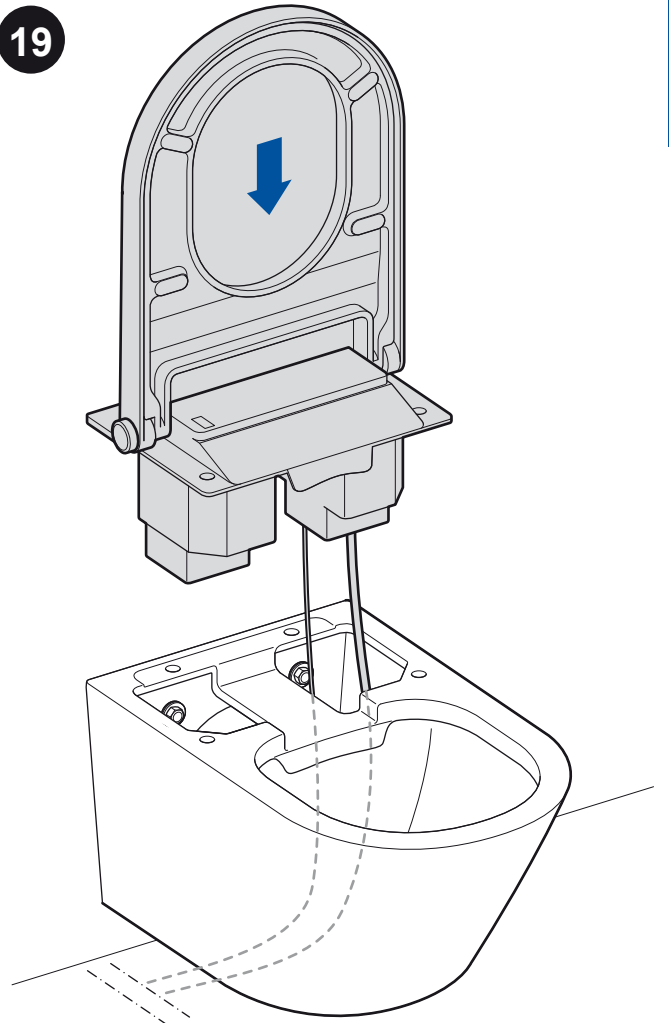


Installation A




20

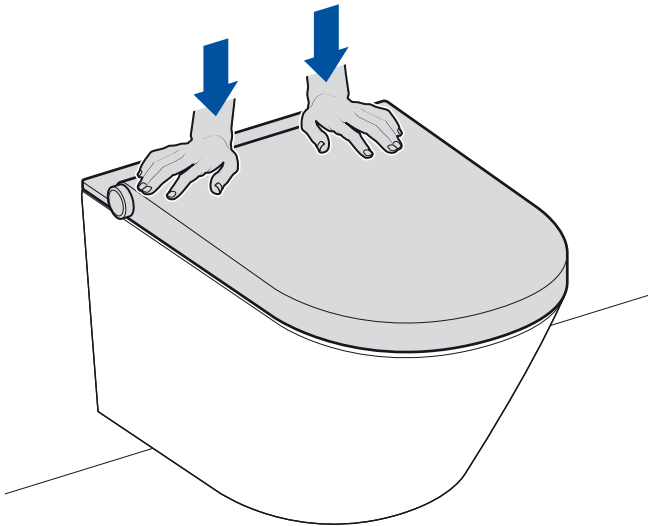

21

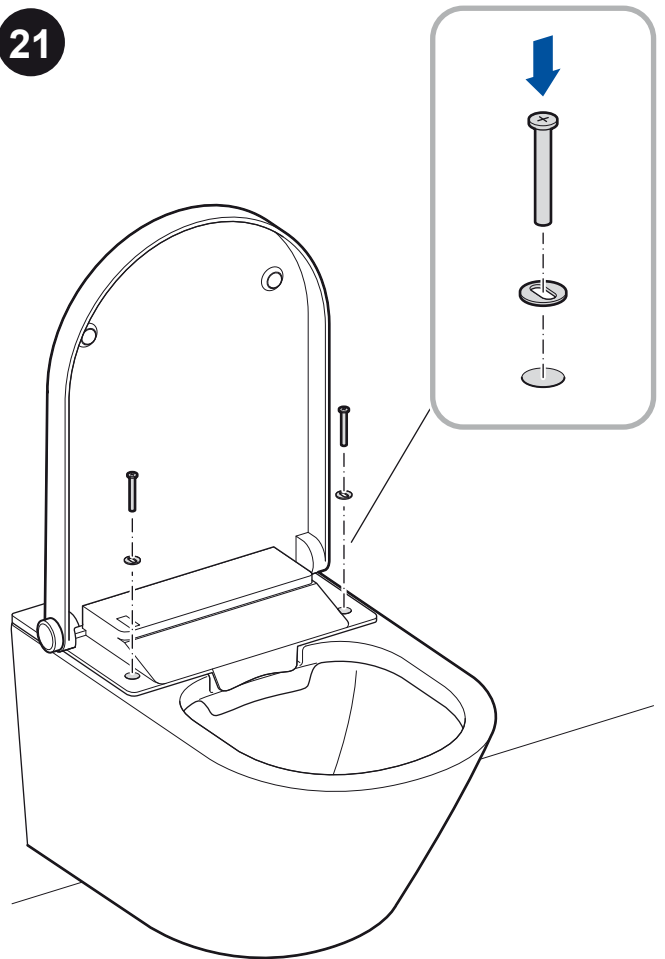


22

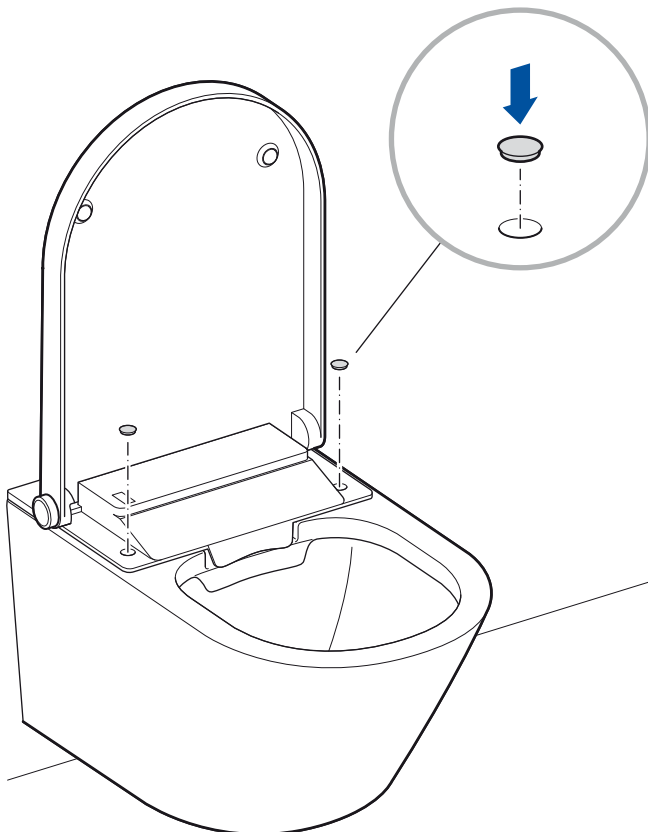

23

### Notera!


Avlägsna skyddsfolien på hållarens baksida.  
 Montera den självhäftande handkontrollens hållare på väggen, inom räckhåll från **Bidé Elegant**.  
 Handkontrollen klickar fast i hållaren med hjälp av inbyggd magnet.

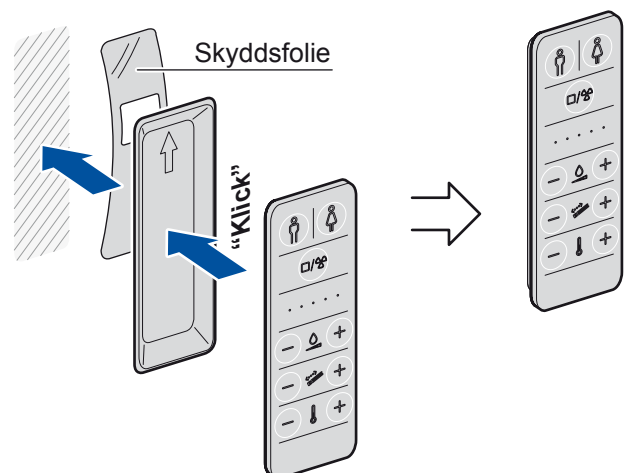

24



**OBS! All installation av el måste utföras av behörig personal. Anslut el med fast installation eller stickkontakt (100-240 VAC, 50/60 Hz).**

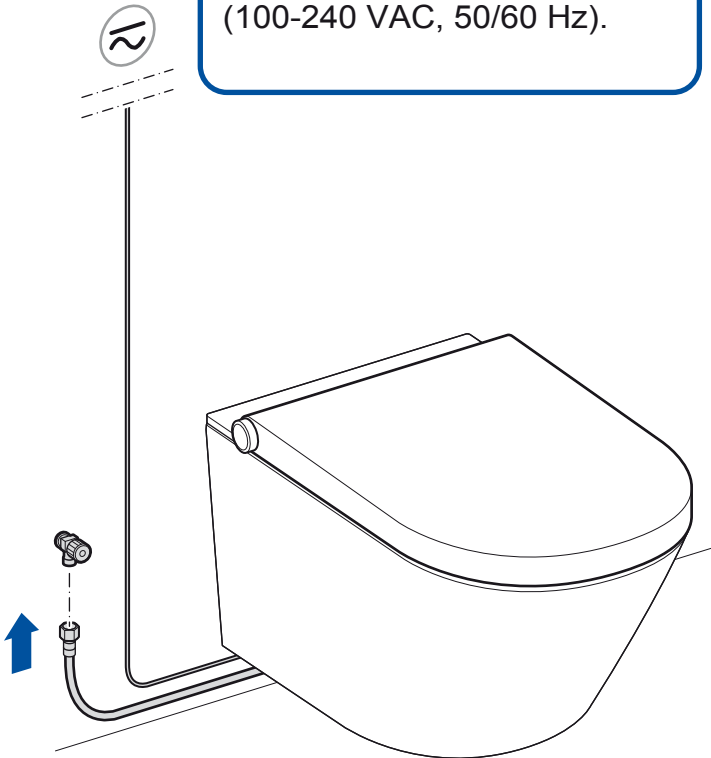


25



Öppna ventilen för **vatten in** och kontrollera noga så att inget vattenläckage förekommer. Provspola **Bidé Elegant**. **OBS! Syna avloppet noga så att inget vatten rinner ut när man spolar!**




26

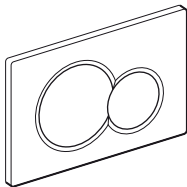

### Viktigt!

Vid uppstart (och efter strömavbrott) genomför **Bidé Elegant** automatiskt ett självtest för att kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt.

**OBS! VIKTIGT att detta självtest inte avbryts!** Självtestet är klart på mindre än 30 sek.

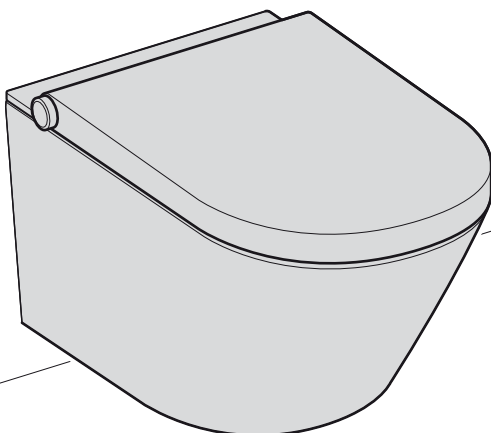


Provkör,  
se produktens  
bruksanvisning




27




**OBS! All installation av el måste utföras av behörig personal.**  
 El och vatten till **Bidé Elegant** anslutes i väggen bakom toaletten.  
 El anslutes med fast installation (100-240 VAC, 50/60 Hz).

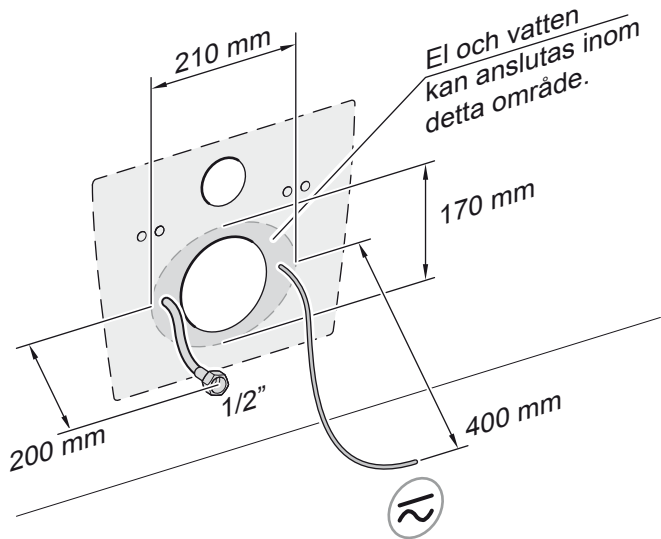


28

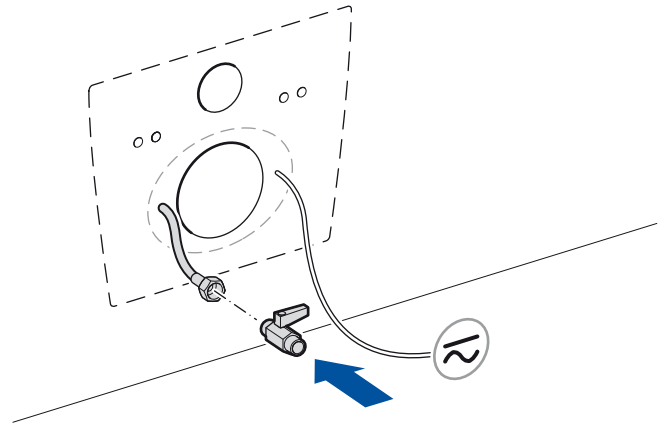

29

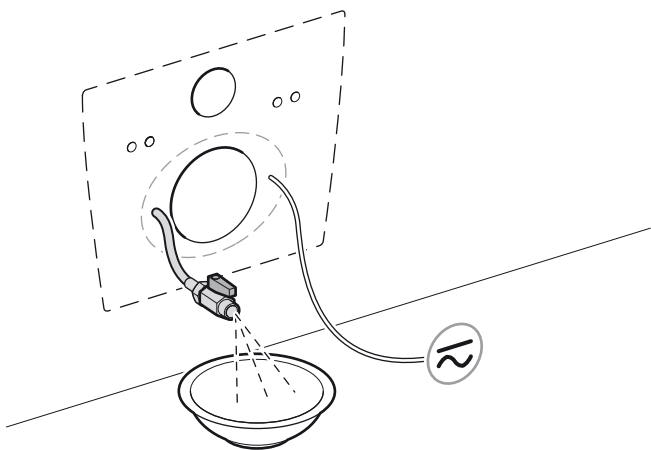


30

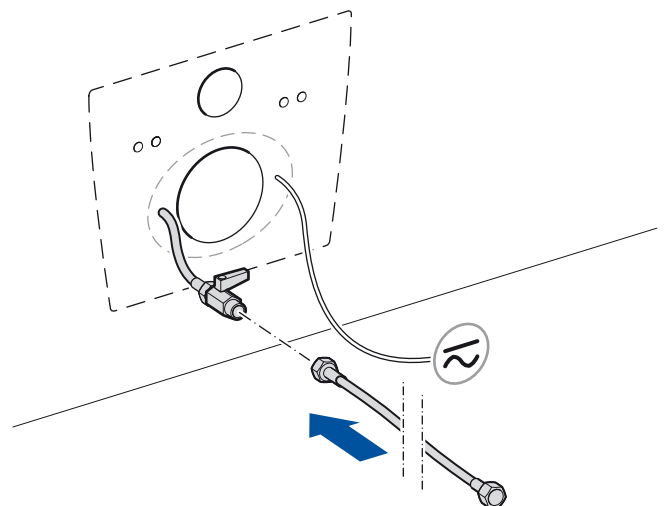


Installation B


31

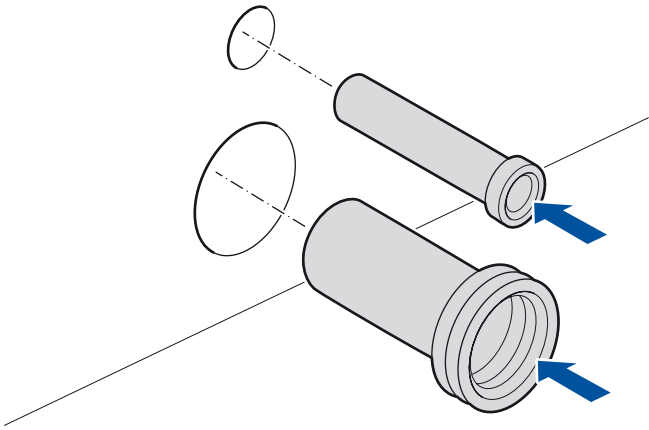


32

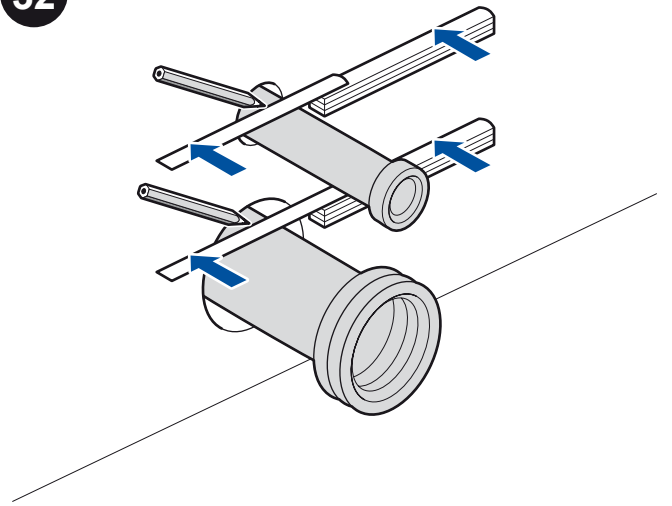

33

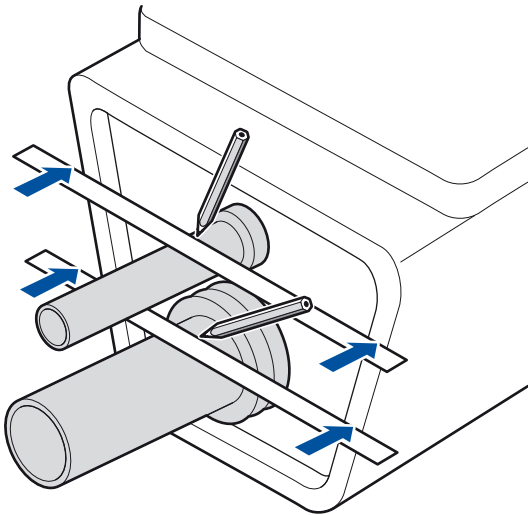


34

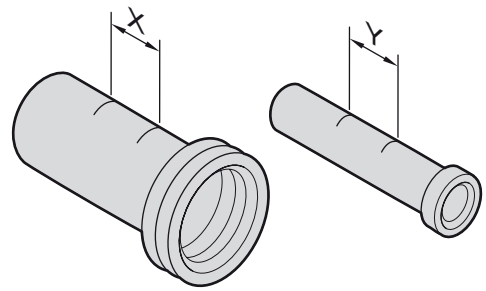


Installation B


35

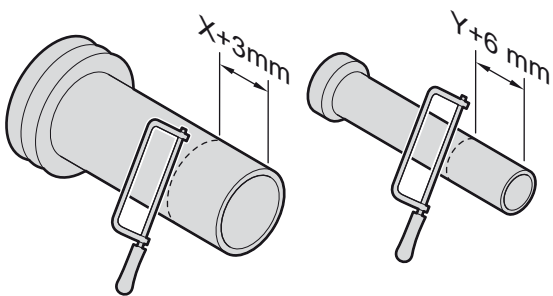


36

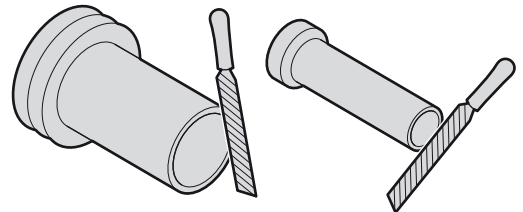


37

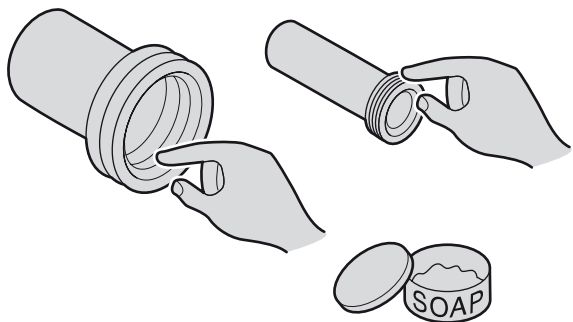


38

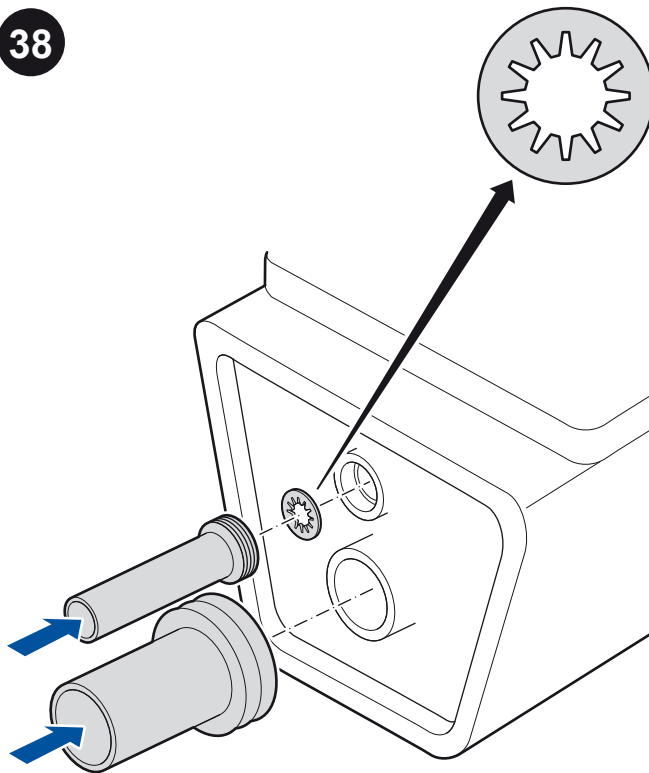

39

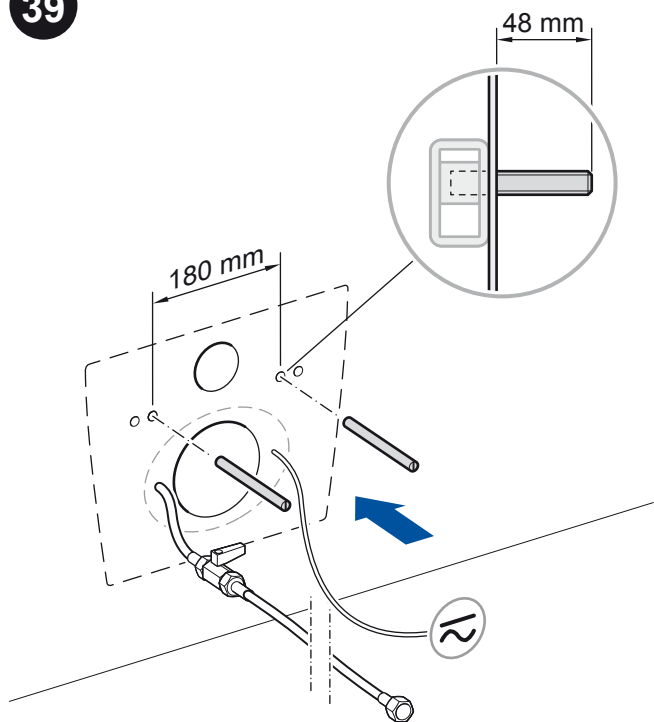


40

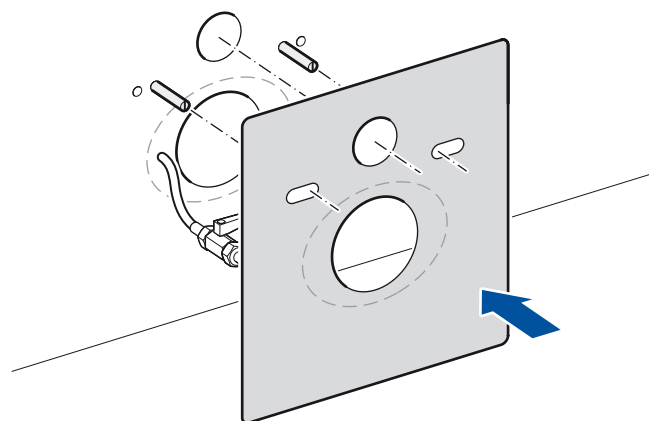


Installation B


41

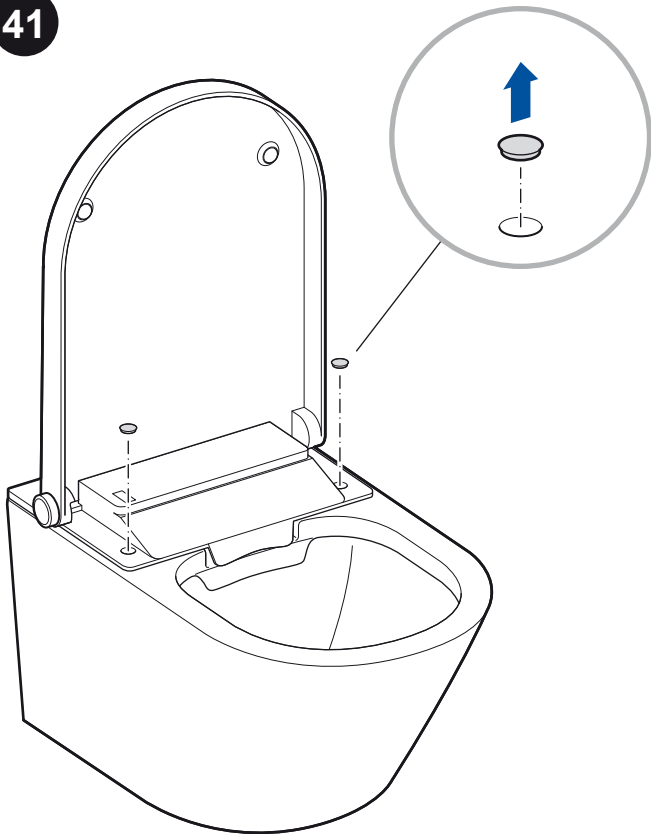

42

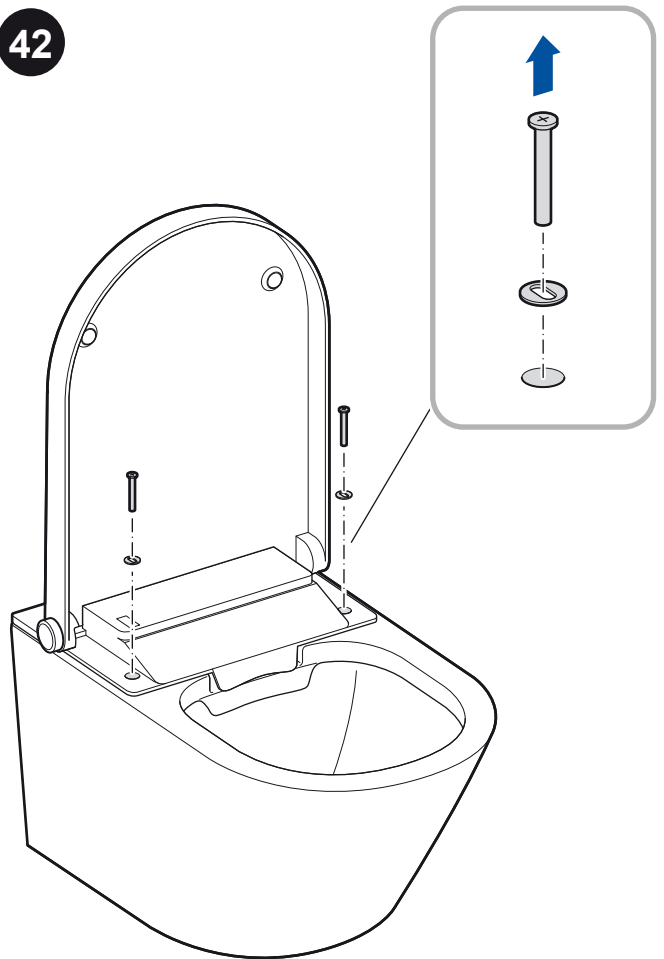


43

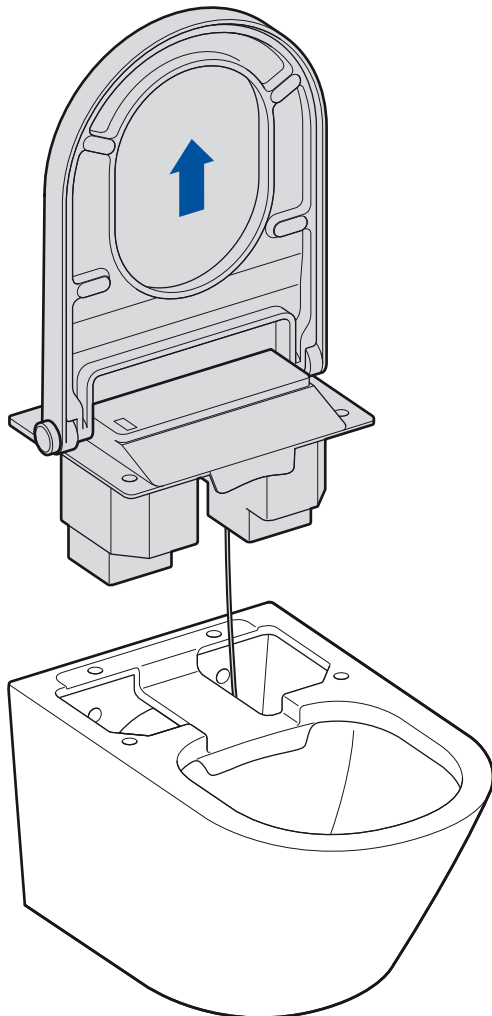


44

**Notera!**  
Smörj spolrör och avloppsrör med fett innan montering.

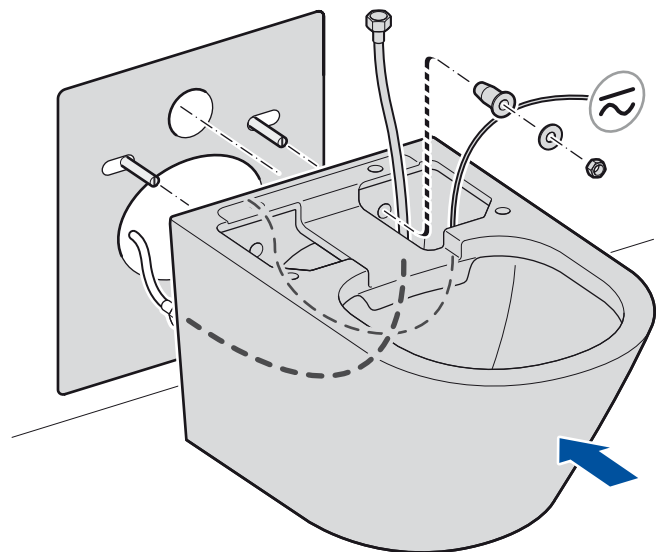


Installation B


45

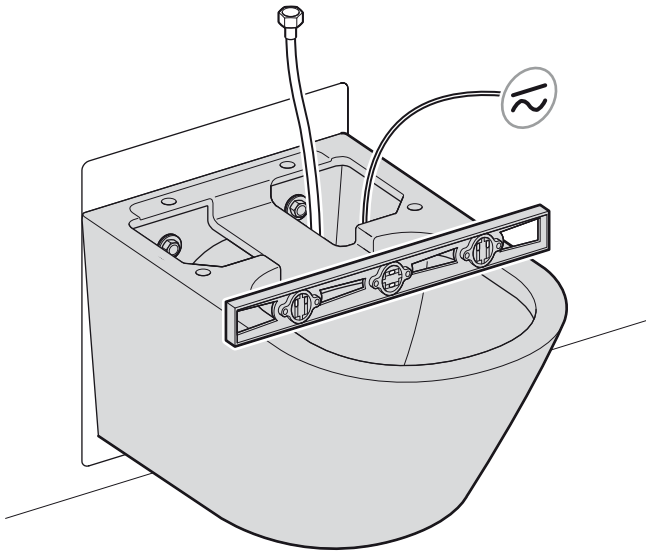

46

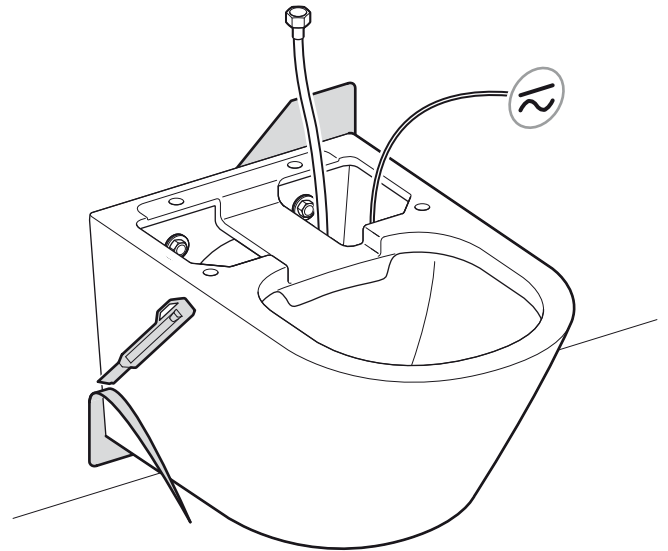


47

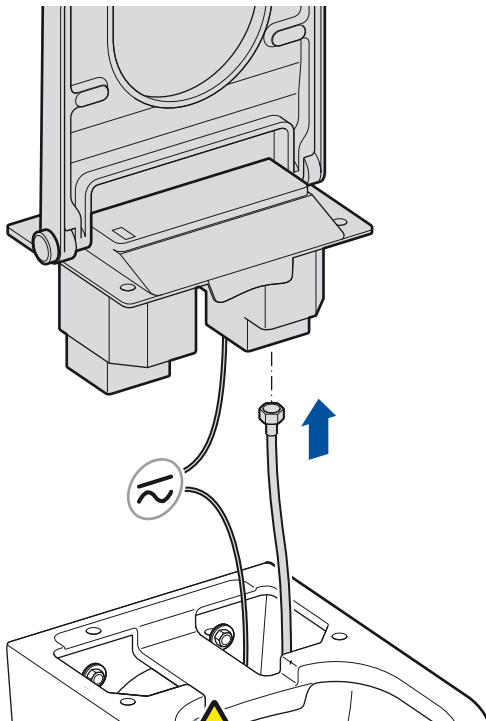


**OBS! All installation av el måste utföras av behörig personal.**  
El anslutes med fast installation (100-240 VAC, 50/60 Hz). Täthetsklass: IP44

48

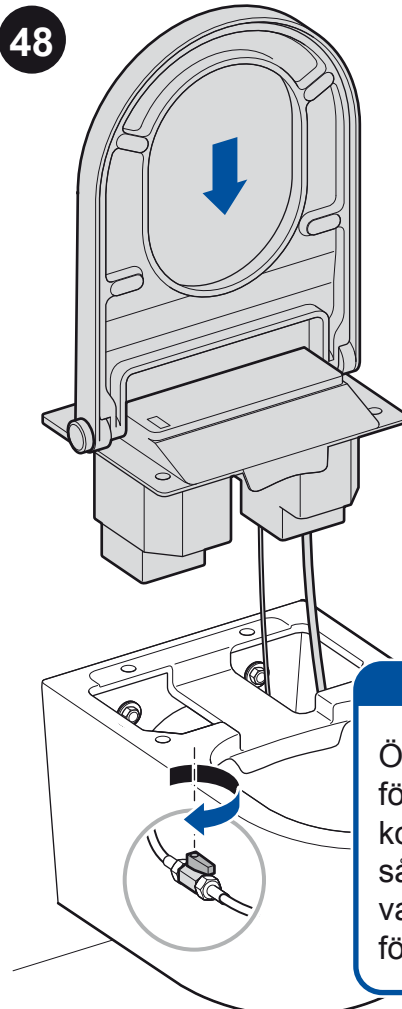


Öppna ventilen för **vatten in** och kontrollera noga så att inget vattenläckage förekommer.


49

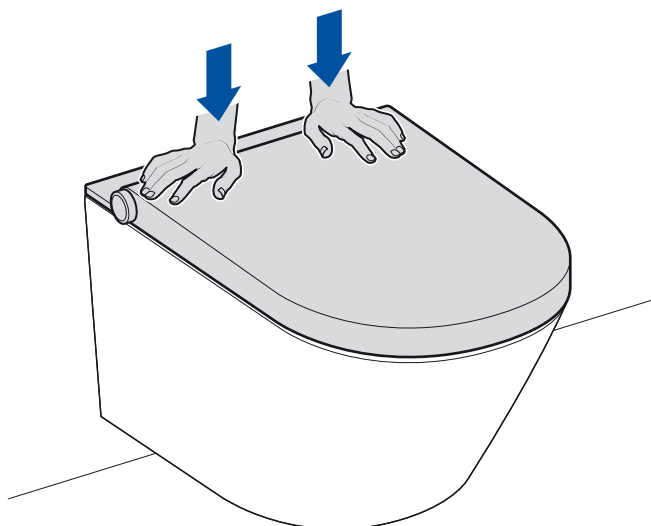

50

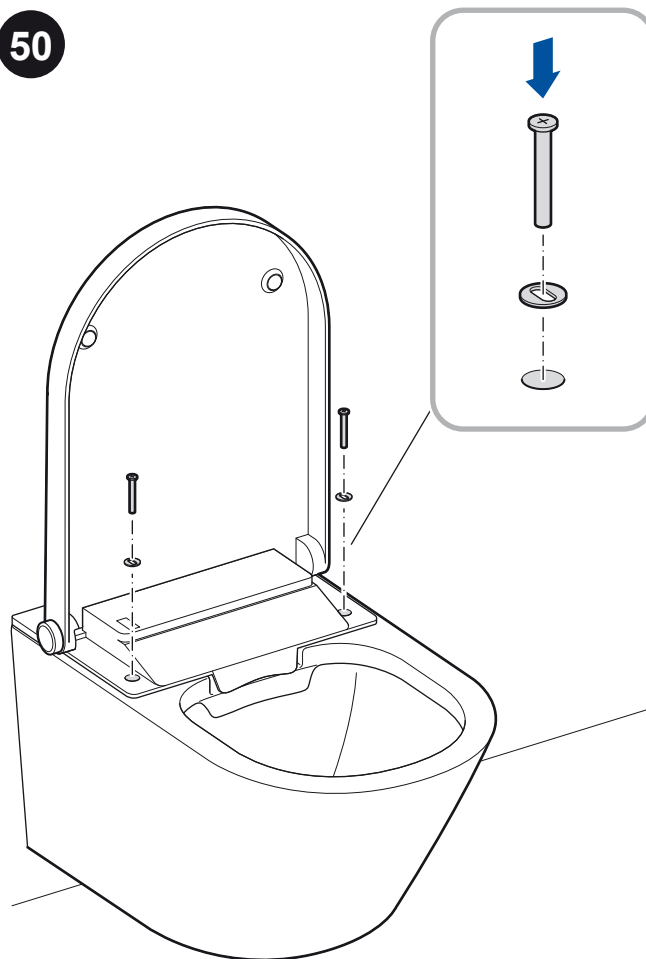


51

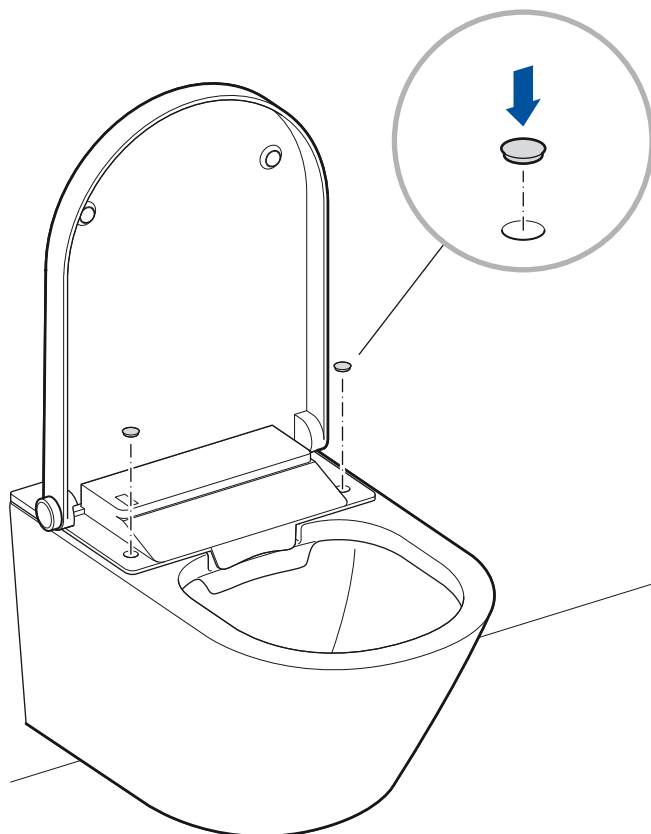

52


**Notera!**

Avlägsna skyddsfolien på hållarens baksida.  
 Montera den självhäftande handkontrollens hållare på väggen, inom räckhåll från **Bidé Elegant**.  
 Handkontrollen klickar fast i hållaren med hjälp av inbyggd magnet.

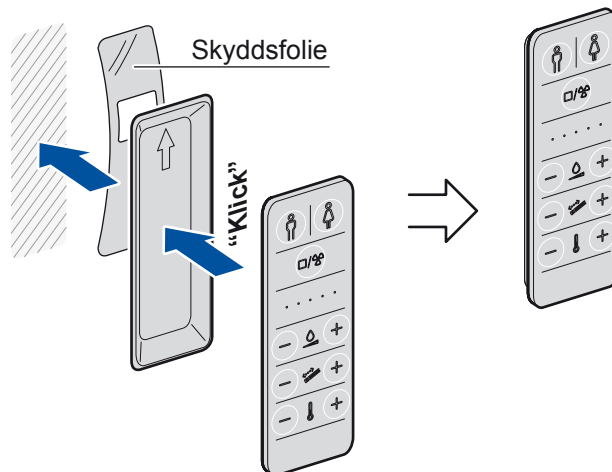




53

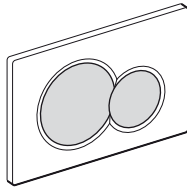

Provspola **Bidé Elegant**.  
**OBS! Syna avloppet noga så att inget vatten rinner ut när man spolar!**

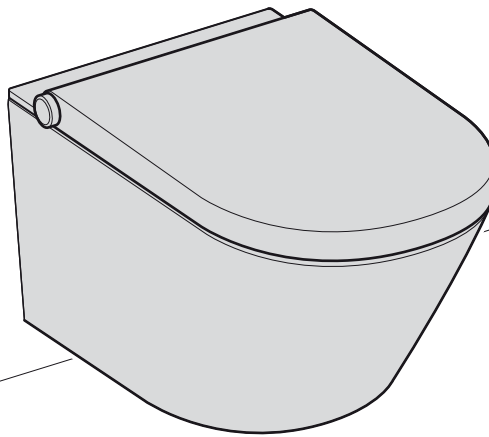

54





### Viktigt!

Vid uppstart (och efter strömavbrott) genomför **Bidé Elegant** automatiskt ett självtest för att kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt.  
**OBS! VIKTIGT att detta självtest inte avbryts!** Självtestet är klart på mindre än 30 sek.

Provkör,  
se produktens  
bruksanvisning



# Måttskiss, Bidé Elegant

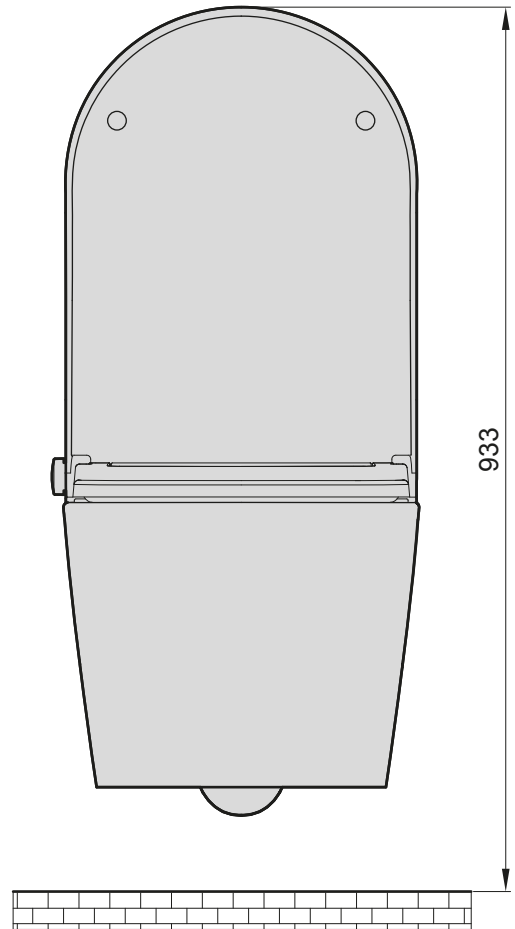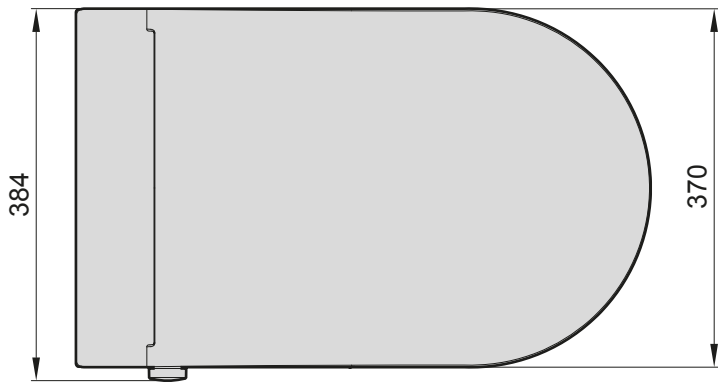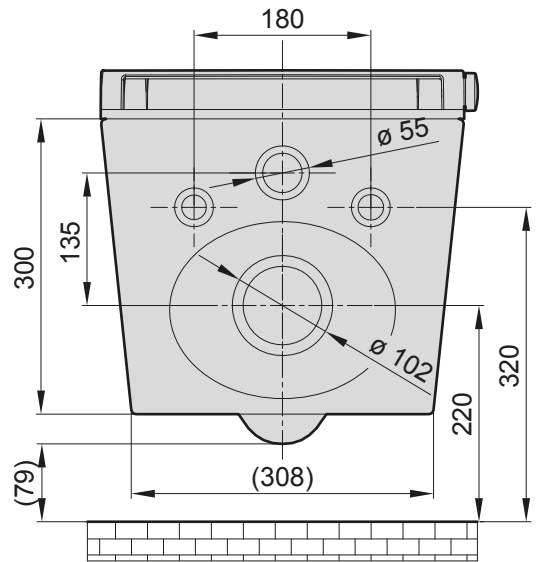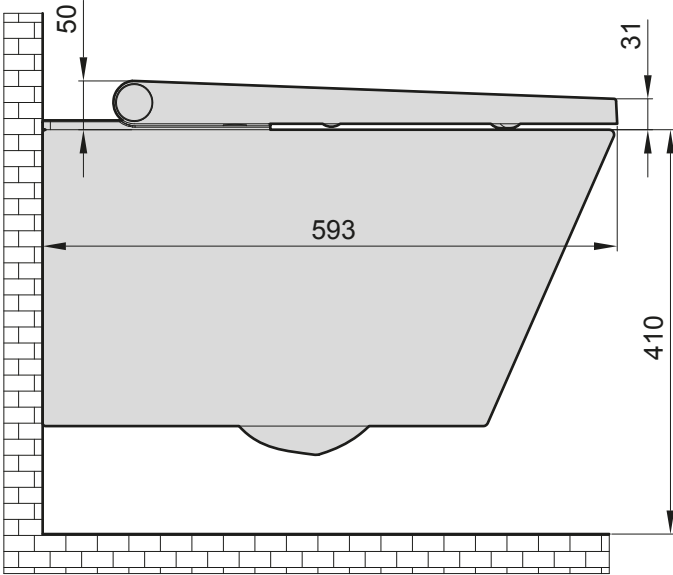

## Teknisk specifikation, Bidé Elegant

Område	Funktion & innehåll	Specifikation
Dusch	Dusch bak	
	Dusch fram	
	Oscillerande dusch	
	Pulserande dusch	
	Oscillerande och pulserande dusch	
	Vattentemperatur	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
	Vattenflöde	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
Varm luft	Duschposition	Justerbar i 5 steg (förinställd 5)
	Varmluftsfläkt	
Hygien	Lufttemperatur	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
	Doftneutralisering	
	Duschmunstycke självrengöring	
Annat område	Duschmunstycke manuell rengöring	
	Nattbelysning	
	Belysning	
	Mjukstängande sits och lock	
	Kontrollknapp	
	Handkontroll	
	Skarvfri toalett	
	Vägghängd modell	
	Vattenanslutning	G 3/8"
	Märkspänning	100-240 V, 50/60 Hz
	Effekt	950 W
	Kabellängd	1,8 m
	Inkommande vattentryck	0,07 ~ 0,75 MPa (0,7 ~ 7,5 Bar)
	Inkommande vattentemperatur	4 ~ 35°C
	Omgivande temperatur	4 ~ 40°C
Täthetsklass	IP44	
Dusch info	Vattenflöde	350 ~ 650 mL/min
	Utgående vattentemperatur	31 ~ 39°C
	Dushtid	3 minuter
	Vattenvärmare	Tank
	Maximal effekt vattenvärmare	1200 W
	Säkerhetsanordning vatten	Termisk säkring/nivåbrytare
	Stopp för vattenretur	Luftspalt
Tork info	Maximal lufthastighet	5 m/s
	Maximal effekt värmefläkt	280 W
	Torktid	3 minuter
	Varmluftstemperatur	35 ~ 50°C
	Säkerhetsanordning luft	Termisk säkring/termostat
Doftneutralisering	Doftneutralisering metod	Diatom
	Doftneutralisering period	15 minuter
Handkontroll	Frekvensomfång	2460 MHz
	Maximal RF utgående effekt	-10 dBm
	Batterityp	3 V CR2032
	Antal batterier	2 st
Övrigt	Annan säkerhetsutrustning	Jordfelsbrytare
	Vikt (netto)	32 kg
	Storlek (mått)	593 x 370 x 380 mm



**SVAN CARE AB**  
Alvägen 1  
771 41 LUDVIKA, Sweden

Tel: 0240-101 02, fax: 0240-100 22  
info@svancare.se  
www.svancare.se