

V-TRAK

BRUKARMANUAL

INFORMATION TILL DIG SOM ANVÄNDER V-TRAK RYGGSYSTEM



INNEHÅLL

OBS. Denna anvisning kan skrivas ut i A4-format på www.fysionord.se

Säkerhet & underhåll	Sida
Säkerhet och transport	3
Översikt	4
Ta bort och sätta tillbaka ryggstödet	5
Garanti	6
Underhåll och rengöring	6


Säkerhet och transport

1. Vtrak ska monteras och justeras enligt denna manual av personal med lämpliga kvalifikationer, såsom arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker.
2. Denna bruksanvisning är avsedd som guide för användare och andra som kommer i kontakt med V-trak.
3. Liksom all medicinsk utrustning kan felaktigt bruk och anpassning orsaka skada.
4. Liksom många modulära system är det möjligt att bygga konstruktioner som går utöver den avsedda funktionen med systemet. Beroende på hur den byggts ihop kan stabiliteten på rullstolen påverkas. Det är förskrivarens ansvar att göra en riskanalys för att säkerställa ett tryggt bruk om konstruktionen går utöver avsedd funktion.

Ytterligare information om V-Trak produkter kan hämtas från:

- Återförsäljare i Sverige Fysionord
- V-Trak websites – www.v-trak.com,

Figur 1

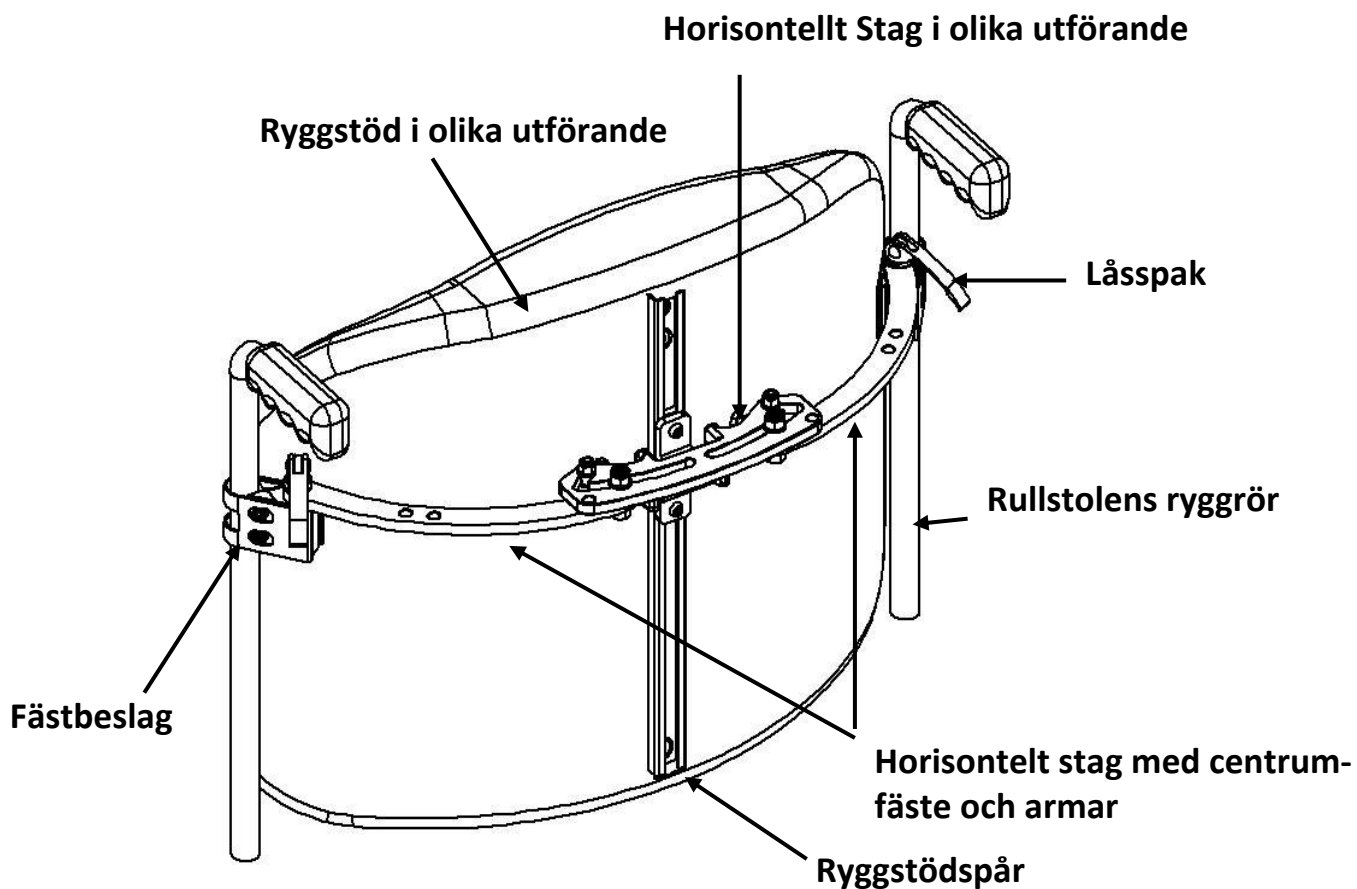

Systemet består av:

- ◆ Två **fästbeslag** på rullstolens sidoryggrör. (Alternativt ett centralt monteringsblock på rullstolens tvärstag.
- ◆ I **fästbeslagen** är fäste för ett horisontellt stag, som finns i flera utföranden
- ◆ Ett **Centralt fästbeslag med armar (CMA)**-är fäste för **ryggstödet**. Alternativa fästen finns.
- ◆ Ryggstöd finns i en mångfald av former, storlekar och kombinationer och är kompatibla med ett stort och variationsrikt utbud av **tillbehör**.

V-trak ryggstöd Profil, Djup och Standard finns även som kompletta boxar. Boxarna innehåller ryggstödet och alla nödvändiga monteringsdetaljer. De kan beställas via ett enda artikelnummer. Se beställningsformuläret.


I den **Segmenterade modellen** ingår hela skalan av V-Trak ryggstöd, de olika ryggsegmenten och tillbehör. Dessa beställs genom att ange de enskilda posterna som tillsammans utgör ett helt komplett ryggstödssystemet. Se beställningsformuläret för information om produktstorlekar och beställningskoder.

Ta bort och sätta tillbaka ryggstödet

För att ta bort eller byta ut ryggstödet när rullstolen fälls ihop för transport, eller för att flytta mellan rullstolar som är utrustade med identiska fästbeslag, observera följande procedur.

Ta bort ryggstödet:

- Höj låsspaken i slutet av varje V-Trak arm förbi låst läge, till olåst läge såsom visas i figuren nedan.
- Med en hand under den yttre änden av varje V-Trak Arm, lyft systemet rak uppåt och ur fästbeslagen.
- Ta bort ryggsystemet från rullstolens chassi.

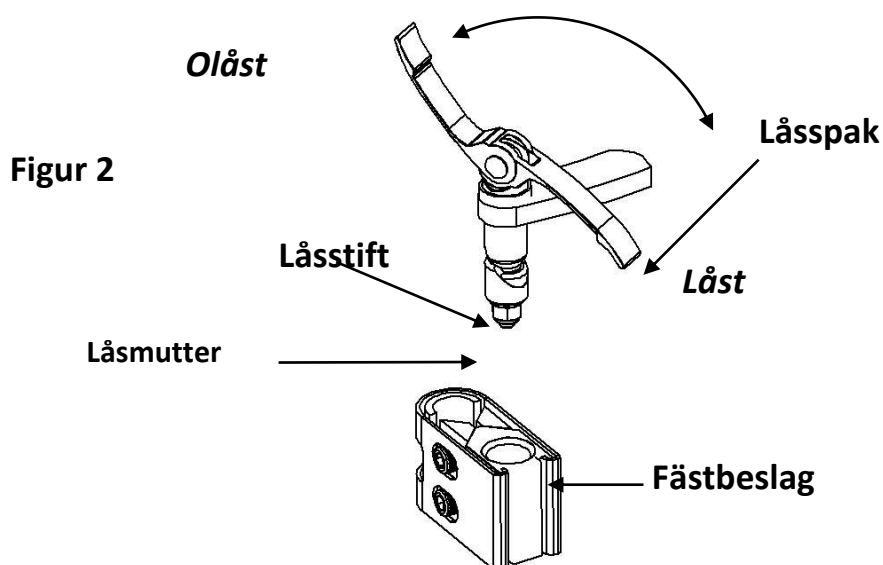

Sätt tillbaka ryggstödet

1. Se till båda låsspakarna är i olåst läge.
2. Med båda händerna under de yttre ändarna av V-Trak Arms, sänk systemet jämnt ner i fästbeslagen på rullstolen.
3. När låsmekanismen är nere i hålen i fästbeslagen, tryck till ordentligt. Se till att stiften är så långt ner det går att komma innan du trycker låsspakarna nedåt tills dom är helt vertikala i låst läge. Systemet är nu ordentligt fastsatt på rullstolen.
4. Kontrollera säkerheten i ryggstödet innan någon sitter i rullstolen.

Obs: Det kan vara nödvändigt att justera den kraft som krävs för att låsa och låsa upp systemet för att:

1. anpassa kraften som krävs för att frigöra beroende på fingerfärdighet hos användaren
2. maximera för att bibehålla fastsättningen av ryggstödet.

Garanti

OM PRODUKTEN GÅR SÖNDER SKA ANSVARIG FÖRSKRIVARE ELLER HJÄLPMEDELSCENTRAL KONTAKTAS.

V-Trak Ltd garanterar hela V-Trak sortimentet av produkter mot felaktiga material- eller tillverkningsfel under en period av 24 månader från fakturadatum till slutanvändare, med förbehåll för följande:

1. Varor måste ha köpts från en auktoriserad leverantör (Fysionord)
2. I händelse av en fordran måste kunden omedelbart meddela leverantör.
3. Felaktiga varor måste behållas av kunden för inspektion av leverantör/tillverkare.
4. Felaktiga produkter kommer att repareras eller bytas ut kostnadsfritt enligt tillverkarens val.
5. Produkter måste vara monterad i enlighet med tillverkarens anvisningar.
6. Produkterna måste användas för de ändamål för vilka de var avsedda.

Begränsningar

Garantin täcker inte:

- ◆ Normalt slitage.
- ◆ Onormalt slitage eller felaktig användning.
- ◆ Otillåtna ändringar eller justeringar.
- ◆ Skada eller försämring på grund av underlåtenhet att underhålla produkten enligt anvisningarna.

Underhåll & rengöring

När installationen är klar, ska ansvarig personal kontrollera att:

1. Alla skruvar är helt åtdragna
2. Alla brickor och låsmuttrar finns
3. Alla låsmuttrar är ordentligt åtdragna utan att lossa huvudskruven
4. Att det går smidigt att ta av och sätta på ryggen

*Det är viktigt att kontrollera ovanstående punkter med jämna mellanrum.
Intervall mellan inspektionerna bör motsvara typen av användning.*

Tvättråd

Överdragen är som standard gjorda av skum och tyg och de är luft- och vatten genomsläppliga. Smuts och fläckar bör avlägsnas omedelbart med en fuktig trasa. Överdragen kan maskintvättas; observera instruktionsymbolerna nedan.

Ersättnings-överdrag finns. Läs mer om skötsel i anvisning för rekonditionering.



VÄVNADSKADOR OCH TRYCKSÅR

Som med alla hjälpmedel för sittande måste man vara observant för risk för vävnadsskada eller trycksår.

Inom V-traks sortiment av ryggstöd och tillbehör finns det en stor variation av storlekar, former, positionerande och flexibla stöd, för att kunna erbjuda bra tryckfördelning och tryckutjämning.

Felaktig positionering kan ge upphov till risk för skada, speciellt på områden där risk för tryck är hög, exempelvis sacrum eller skulderbladen.

Om hudskador uppstår ska ansvarig hjälpmedelsförskrivare kontaktas omedelbart.

Denna dokumentation kan fyllas i av förskrivare eller hjälpmedelspersonal v.b.

Brukarens namn: _____
Förskrivare: _____
Manual avsedd för: _____
Datum: _____
Hjälpmedelskonsulent: _____
Hjälpmedelstekniker: _____
Telefonkontakt vid problem: _____
Rekommenderad uppföljning: _____
Representant från återförsäljare: _____

Artiklar:

Antal:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Om du har några synpunkter eller kommentarer om råd och anvisningar som ges i denna manual vänligen maila dem till oss på adressen nedan. Detta kommer att hjälpa oss att uppnå våra mål att tillhandahålla korrekt, aktuell och relevant information för en säker användning och distribution av våra produkter och största möjliga nytta för användarna.



Designed and made in Wales by:

V-Trak Ltd
17 Kent Road
Bridgend Industrial estate
CF31 3TU
UK

Tel: +44 (0)1443 236 530
Email: info@v-trak.com

Återförsäljare i Sverige:

Fysionord AB
Sionsvägen 2
872 64 Sandöverken
SVERIGE

www.fysionord.se
info@fysionord.se
0730-32 92 99