

Rekonditionering av Gripo Alu

Tvättmedel= rengöringsmedel med pH 6 som inte repar. Rengör inte produkten med maskindiskmedel, klorin eller aceton.

Alla delar kan tvättas med vanliga rengöringsmedel i max. 60 °C. Undvik starka lösningsmedel.

Desinfektion = spritlösning eller motsvarande.

Sänk inte ner produkten i vatten eller i andra vätskor.

Torka av produkten med en fuktig trasa med tvättmedel, torka efter med en trasa med enbart vatten och torka torrt efteråt. Därefter desinficering.

Kontrollera gummilisterna på golv- och takplatta. Rengör med spritlösning.

Efter rengöring måste alla delar vara helt torra innan de monteras.

Gör likaledes med alla tillbehör till Gripo Alu.

Innan en Gripo-stång återanvänds så bör man kontrollera så att inte stångens metall har blivit skadad någonstans.

Kontrollera även en liten sprint som håller fotpedalen på plats (yttre rör). Den kan krypa ur sin plats om stången monterats upprepade gånger.

Montera upp stången mot ett stadigt tak och låt den stå monterad någon dag för att kontrollera att inte den röda markeringen kommer fram.

Underhåll: Livslängden på gasfjädern förlängs om stången spänns upp två gånger per år.

Återvinning/Material: Stång = Aluminium, Svarta plastdelar = PA6, Vita gummiringar = Gummi.

Andra delar = Stål, koppar och aluminium.

Alla delar ska återvinnas enligt lokala bestämmelser. Kontakta din lokala återvinningscentral.