

GRIPO

BRUKSANVISNING

SVENSKA



CE

HEPRO

Förord

Gripo är ett stadigt och flexibelt stödverktyg som erbjuder säkerhet när man ska ställa sig upp och rör sig runt i hemmet. Gripo passar i de flesta hem med takhöjder på mellan 210 och 300 cm och är mycket enkel att montera. För takhöjder under 210 cm och över 300 cm erbjuder Hepro Gripo Special och Gripo Lång. Stödstången fungerar utmärkt utan tillbehör, men kan även kompletteras med användbara tillbehör. Stora rutan – Läs bruksanvisningen.

Med Gripo kombinerar vi kvalitet och miljö. Produkten är tillverkad av återvinningsbara material som är skonsamma mot huden och korrosionsresistenta, vilket innebär att den är idealisk för användning i våtrum och fuktiga miljöer. På Hepro har vi ett holistiskt synsätt på miljön. Därför levereras Gripo i återvinningsbara, miljövänliga förpackningar märkta med Gröna Punkten – ett medvetet val för att skydda både människor och natur.

Stången har testats och godkänts enligt relevanta delar av EN 12182:2012 och överensstämmer med EN 21856:2022. Stången är tillverkad av aluminium och plast och är avsedd att spännas fast mellan golv och tak i rum vars tak och golv är tillräckligt starka för att klara en punktbelastning på 100 kg.

Stången monteras snabbt och enkelt utan skruvar eller verktyg och fästs säkert mellan golv och tak. Med ett brett utbud av tillbehör kan den anpassas efter olika användarbehov. Hepro arbetar ständigt med att ta fram nya tillbehör utifrån användarnas behov och erbjuder nu en ny sängskena samt nya tillbehör för svagare tak.

Hepro är en tillverkare och kan därför erbjuda skräddarsydda lösningar vid behov. Hepro är ett norskt industriföretag som utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för äldre personer och personer med nedsatt rörelseförmåga. Företaget grundades 1987 och har idag cirka 85 anställda. Företagets huvudkontor och fabrik ligger i Rognan i Nordland.

Hepro AS, Tømmerveien 10, 8250 Rognan.

VIKTIGT!


Läs bruksanvisning noggrant innan du använder stången

Gripo

Artikelnr 35200 Gripo

Artikelnr 35210 Gripo Lång

Artikelnr 35202 Gripo Special

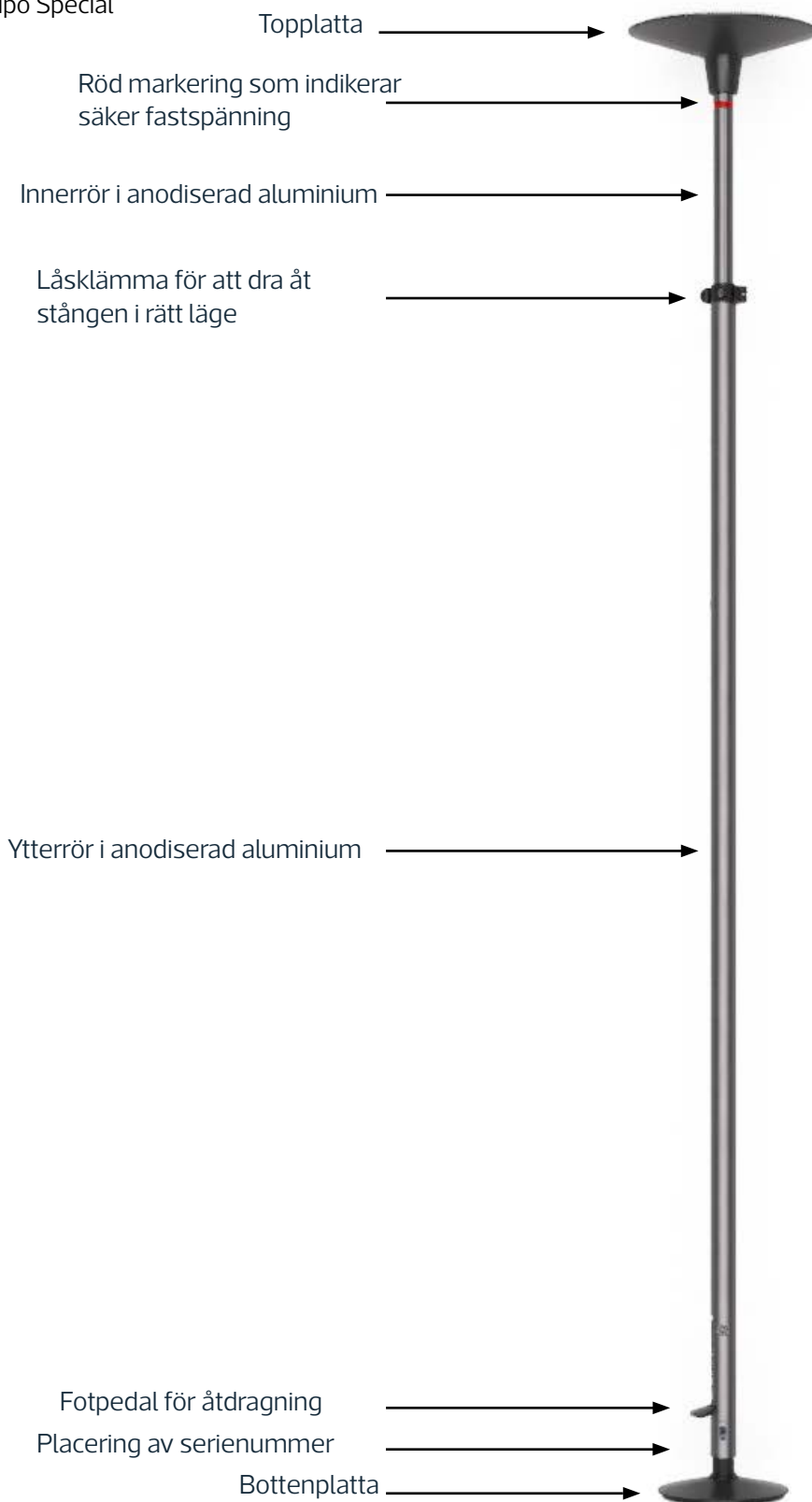

Säkerhet

Denna produkt är avsedd för användning i privata hem eller vårdboendemiljöer.

- Använd inte produkten om den röda säkerhetsringen längst upp på stången är synlig.
- Ta alltid hänsyn till klämrisker mellan stången och andra föremål vid monteringen. För mer information, läs punkt 4 och 5 på sidorna 9–10 i den här bruksanvisningen.
- Montera inte produkten på föremål som inte är säkert fästa i tak eller golv, exempelvis golvmattor, plattor eller liknande.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Placera inte produkten på ytor som inte är plana eller parallella.
- Vid montering i våtutrymmen ska halkskyddsmattor användas: artikelnr 35007
- Produkten får aldrig modifieras eller ändras på något sätt som inte beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte den här produkten tillsammans med tillbehör som inte tillhör Gripo/produkten.
- Gripo kan monteras i duschen, men produkten ska inte vara permanent nedsänkt i vatten eller andra vätskor.
- Var försiktig när du öppnar förpackningen för att undvika att skada dig själv eller produkten.

GRIPO BESTÅR AV:

1 x Basplatta (den minsta)
1 x Topplatta (den största)
1 x Stång
1 x Gasfjäder
1 x Bruksanvisning

VARIANTER

Artikelnr	Beskrivning	Takhöjd
35200	Gripo	210–300 cm
35210*	Gripo Lång	260–340cm
35202	Gripo Special	Lägre än 210 cm

* Den här varianten är extra hög, men har dessutom ett 15 cm längre ytterrör som passar den som vill kunna fästa tillbehör högt upp på stången, t.ex. vid träning/aktivitet.

Innehåll

Förord	2
Gripo	3
Säkerhet	4
Innehåll	5
1 Symbolförklaring	6
2 Förpackningens innehåll	6
3 Miljö	7
4 Riskbedömning av avstånd vid montering	9
5 Säkerhet vid montering	10
6 Instruktioner för användningar	11
7 Montering	13
8 Demontering	16
9 Underhållsrutiner	17
10 Garanti	17
11 Revisioner av denna bruksanvisning	18

1 Symbolförklaring



Tillverkare



Serienummer
CE-märkning



Varning




Medicinsk utrustning



Tillverkningsdatum




Läs bruksanvisningen noggrant före

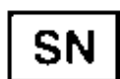

användning.

2 Förpackningens innehåll

STÅNG

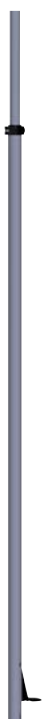

TOPPLATTA/BASPLATTA



GASFJÄDER



3 Miljö

3.1 MATERIAL OCH ÅTERVINNING

Gripo återvinns enligt lokala bestämmelser. Kontakta din lokala återvinningscentral för mer information.

När Gripo har nått slutet av sin livslängd går det snabbt och effektivt att sortera komponenterna.

Del	Material	Sorteras som
Aluminiumprofiler (anodiserade)	Aluminium	Metall
Bas- och topplatta, samt övriga plastdetaljer	PA6	Plast
Gasfjäder	Rostfritt stål	Metall
Fotpump	Aluminium	Metall
Fästelement (skruvar, muttrar, brickor, hylsa)	Stål, koppar, aluminium	Metall

Lång livslängd och hög kvalitet:

Under utvecklingen av Gripo har vi lagt stor vikt vid att välja material av hög kvalitet. Produkten är tillverkad av slitstarka material och har en robust konstruktion. Gripo har testats av både Hepro och användare i över 20 år med avseende på maximal prestanda och livslängd. En långvarig användning bidrar till att vi sparar resurser och främjar en mer bärkraftig användning – till fördel för både dig och miljön.

Reparation och återanvändning:

Konstruktionen möjliggör utbyte av delar. Vi erbjuder reservdelar under avtalsperioden och fem år därefter, vilket minskar svinn.

ALUMINIUMSTÅNG:

Gripo's anodiserade aluminiumstänger är 100 % återvinningsbara. De kan återanvändas i det oändliga utan kvalitetsförlust. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast 5 % av den energi som krävs för att producera nytt aluminium. Med andra ord är det ett extremt hållbart alternativ.

Anodiseringen ger en hård, hållbar yta som skyddar mot både repor och korrosion, vilket innebär att stängerna är idealiska för krävande miljöer och i våtrum. Den jämna, släta finishen gör materialet lätt att rengöra, samtidigt som det säkerställer en lång hållbarhet och optimal funktionalitet.



PLASTDELAR I PA6:

Plastdelarna vi använder är tillverkade av det extremt slitstarka materialet PA6. Materialet har testats av Hepro för maximal prestanda och livslängd. Materialet tål både höga och låga temperaturer, även under tung belastning. Materialet är starkt, hållbart och lätt att rengöra, vilket säkerställer en god hygien under hela produktens livslängd. Materialet är ett hållbart val som kombinerar hög kvalitet och tillförlitlighet.



4 Riskbedömning av avstånd vid montering




Ta alltid hänsyn till klämrisk mellan Gripo och andra möbler/föremål. Var särskilt uppmärksam på avståndet mellan stången och andra möbler, och beakta avståndet så att användaren inte kan fastna mellan Gripo och möbeln.



För att undvika klämrisk måste Gripo monteras med rätt säkerhetsavstånd till föremål som används tillsammans med och i anslutning till Gripo. Kritiska klämriskområden är bål, nacken och huvudet. Se till att "Rekommenderade avstånd mellan objekt" efterlevs. Dessa avstånd är viktiga för att säkerställa säker användning och förhindra allvarliga skador.

REKOMMENDERADE AVSTÅND MELLAN FÖREMÅL

För att undvika klämrisk:	Rekommenderat avstånd för vuxna	Rekommenderat avstånd för barn
Huvud/nacke/bål	Mindre än 120 mm eller mer än 250 mm	Mindre än 60 mm eller mer än 250 mm
Fötter	Mindre än 35 mm eller mer än 100 mm	Mindre än 25 mm eller mer än 45 mm

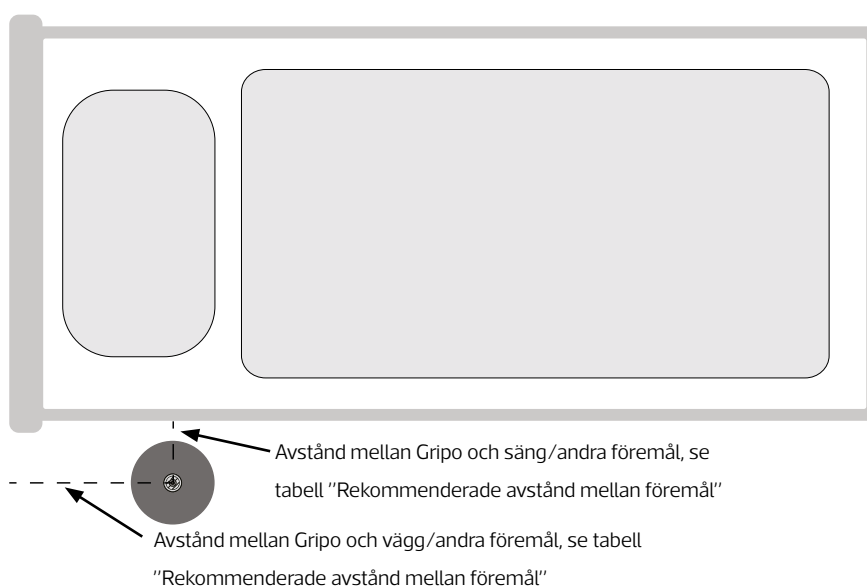


5 Säkerhet vid montering

Personal som installerar Gripo måste ta hänsyn till följande:

För att undvika att användaren fastnar mellan Gripo och andra föremål ska de rekommenderade avstånden respekteras.


Observera att justerbara och/eller rörliga föremål kan leda till att avståndet mellan Gripo och föremålet ändras. Exempel på flyttbara och/eller justerbara föremål är lyftstolar eller sängar som kan höjas, sänkas och/eller rullas.

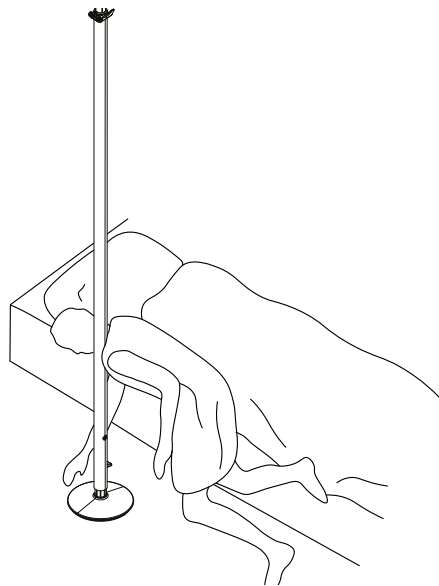

Observera att Gripo är ett stadigt och flexibelt stödverktyg som erbjuder säkerhet när man ska ställa sig upp och rör sig runt i hemmet. Om ett hjälpmedel behövs för att förhindra att användaren faller ur sängen ska tillbehör som är lämpliga för detta ändamål användas och inte själva Gripo-stången.

Ta alltid hänsyn till klämrisker mellan Gripo och andra möbler vid monteringen.

För att förhindra klämrisk mellan sängen/stolen och Gripo kan ett cirkulärt grepp D30, eller motsvarande tillbehör, monteras, som visas på bilderna.

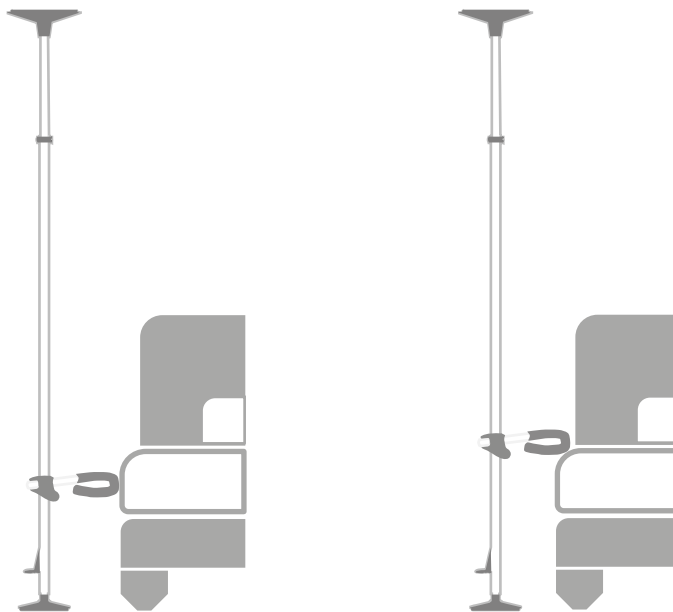

6 Bruksanvisning

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD I ENLIGHET MED:

- MDR 2017/745
- Relevanta delar av EN 12182:2012 i enlighet med EN 21856:2022

ANVÄNDNINGSMILJÖ

Den här produkten är avsedd för användning i privata hem eller vårdmiljöer. Gripo-stången ska ha rumstemperatur innan den sätts upp.

ANVÄNDARVIKT

Max användarvikt 210 kg.

GRIPO:s MÅTT

Vikt	4,7 kg
Höjd	210–300cm
Basplattans bredd	29 cm

TRANSPORT

Under transport ska produkten säkras så att den inte riskerar skada passagerare eller andra föremål.


AVSEDD ANVÄNDNING

Gripo är en mångsidig stödstång som kan användas i flera olika situationer. Stången kan monteras i badrummet, vid sängen, i korridoren eller någon annanstans där du behöver stöd för att resa dig upp. Stödstången fungerar utmärkt utan tillbehör, men kan även kompletteras med användbara tillbehör beroende på dina individuella behov.

6.1 MONTERING AV GRIPO MOT TAK

Innan Gripo monteras bör takkonstruktionen kontrolleras med avseende på styrka och önskad placering av stången. Tak och golv måste vara tillräckligt starka för att klara en punktbelastning på 100 kg.

Om taket är tillverkat av gips är det mycket viktigt att Gripo monteras enligt skissen. Undvik att placera Gripo mellan takbjälkar och i tak med spånskivor. Vid montering av Gripo i gipstak eller andra svaga innertak rekommenderas du använda tillbehör för svaga innertak. Dessa tillbehör ger en extra förstärkning mellan stångens topplatta och taket.

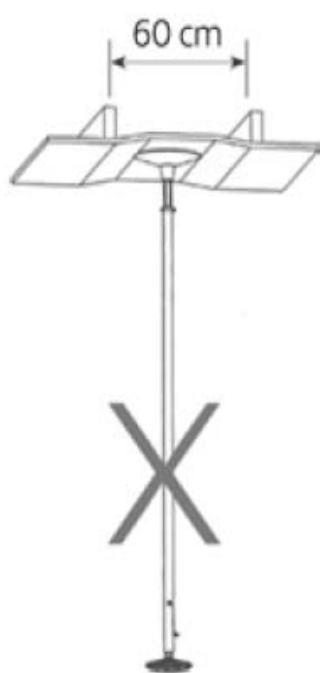

Felaktigt



Använd en stor platta



Korrekt

7 Montering

1

Innan du börjar montera.

1. Placera stangen på den lilla basplattan, så att stangen passar in i spåret.
2. Placera gasfjädern längst upp på innerröret och tryck gasfjädern mot det röda säkerhetsmärket.
3. Fäst den stora toppplattan längst upp på gasfjädern så att stangen passar in i spåret.




Takbelastningen är 100 kg.


1



2

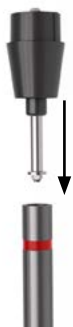

3

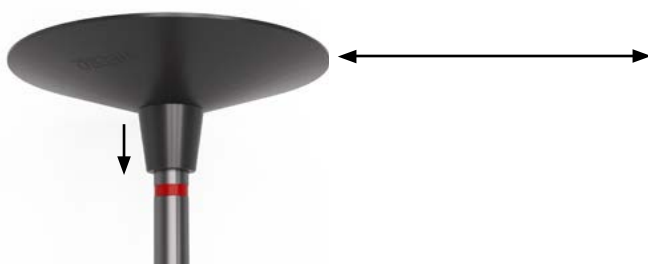

2

Placera stangen på lämplig plats.

1. Dra ut fotpedalen.
2. Öppna låsklämman.

1



2



3

Skjut innerröret uppåt tills topplattan når taket. Basplattan ska ha fortsatt kontakt med golvet.

Se till att stangen är lodrät.



4

Vrid det inre röret medurs så att det låser fast i det yttre röret.



5

Lås låsklämman.
OBS! Se till att skruven på låsklämman är åtdragen.



6

Tryck ned fotpedalen. Om du är osäker på om taket tål belastningen ska du försiktigt trycka ner fotpedalen, samtidigt som kontrollerar att inga sprickor uppstår i taket.

Kontrollera att den röda markeringen är borta.
Om den röda markeringen är synlig, demonterar du stången och börjar från punkt 2.



Se till att den röda markeringen inte är synlig under användningen.
Om markeringen syns tar du ner stången och sätter upp den igen.
Kontrollera att spännskruven på låsklämman inte är lös och att innerröret är ordentligt fastskruvat.
Om den röda markeringen fortfarande är synlig kan det bero på att takkonstruktionen inte är tillräckligt stark.

8 Demontering

Släpp fotpedalen och lossa låsklämman. Vid behov vrider du innerröret moturs.

9 Underhållsrutiner

9.1 RENGÖRING

Tvätta produkten med vatten vid max 85 °C i minst 3 minuter, eller desinficera kemiskt med ett godkänt desinfektionsmedel. Vissa desinfektionsmedel kan missfärga produkten men påverkar inte dess funktion.

9.2 ÅTERANVÄNDNING

Gripo är utformad för att ha en lång livslängd och kan därför återanvändas. För att återanvända Gripo måste topp- och basplattan samt gasfjädern bytas ut. Dessutom måste aluminiumstängerna desinficeras in- och utvändigt. Därefter är Gripo redo för en ny användare.

10 Garanti

Vid normal användning i enlighet med bruksanvisningen har Gripo 5 års livslängd och 5 års garanti. Garantitiden för tillbehör är 2 år. Vid reklamationer eller förfrågningar om produkten ska du alltid ange tillverkarens serienummer som referens.

Vid produktfel ombeds du kontakta

Hepro, tel.: +47 46 74 55 55.

11 Revisioner gällande den här bruksanvisningen

Revision	Datum	Författare	Anteckning
1.0	20.02.2025	Anders Gloslie	Etablerad

Anteckningar

HEPRO

Aktiv och trygg
under livets alla faser

HEPRO AS | Tømmerveien 10, 8250 Rognan - Norge
hepro.no | firmapost@hepro.no | (+47) 46 74 55 55