

# Gripo Stödstång

Ett kraftfullt stöd i vardagen

"Ett system  
- många  
möjligheter



# Gripo stödstång

Ett system - många möjligheter

Gripo är ett stabilt och flexibelt stödhjälpmedel som ger trygghet vid förflyttningar så som uppresningar och överförflyttningar. Gripo är en patenterad lösning som passar i de allra flesta hem, och är också enkelt att montera. Stödstången fungerar utmärkt i standardutförande men man kan också komplettera den med praktiska tillbehör.

- Stöd där det behövs
- Stöder aktiva förflyttningar
- Enkel att montera, flytta och ta ner
- Monteras utan skruvar eller verktyg
- Stort urval av tillbehör
- Otaliga användningsområden



## Gripo

Benämning	Art. nr.
Gripo	35200
Gripo Special	35202
Gripo Lång	35210

## Tillbehör till Gripo



### Multigrepp

Med gummerat handtag. Levereras med rotationsfäste. Kan roteras 360 grader runt stången. Kan monteras med 2 st universalkopplingar 22/40/22 mm om man inte önskar rotationsfunktionen.

Art. nr.

35315



### Cirkulärt grepp

Med gummerat handtag. Kommer i två storlekar: 30 cm och 40 cm i diameter. Inklusive 2 st universalkopplingar 22/40/22 mm. Kan monteras med rotationsfäste.

Storlek

Art. nr.

D30

35281

D40

35280



### Triangelhandtag

Med gummerat handtag. Inklusive universalkoppling 40/22mm. Kan även monteras som fallskydd mellan säng och Gripo.

Art. nr.

35145



## Tillbehör till Gripo



### Vertikalt minigrepp

Rördiameter 22 mm, rörlängd 75 cm. Inklusive 2 st universalkopplingar 40/22 mm. Ett tillbehör till de som tycker att greppet runt gripostången är för stort. Är monterad parallellt längs med stången.

Art. nr.

35158



### Tvåhandsgrepp

Med gummerat handtag. Rördiameter 22 mm, rörlängd 48 cm. Inklusive universalkoppling 40/22. Förenklar förflyttningar så som uppresningar. Vid montering av 2-3 stycken i olika höjder kan användarna träna ståfunktion med hjälp av en klättringseffekt.

Art. nr.

35159




### Kombigrepp


Inklusive 2 st universalkopplingar 40/40 mm. Mycket stabilt grepp. Ger ett bra tvåhandsgrepp eller om man vill haka fast armen. Användaren kan luta sig mot detta grepp vid aktiviteter där händerna används, så som vid matlagning eller av- och påklädning.

Art. nr.

35208

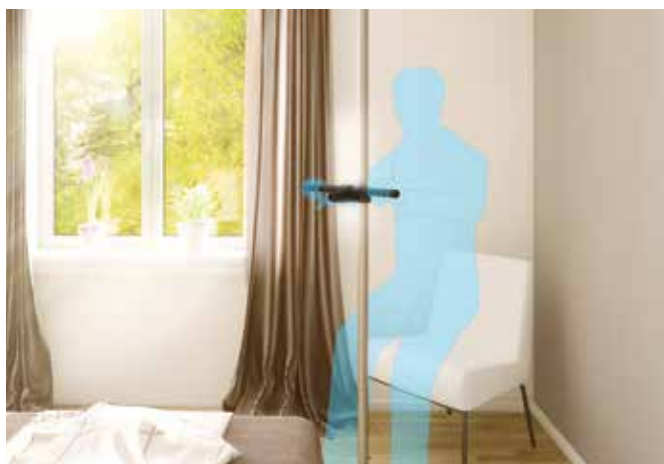

## Fördelar med Gripo

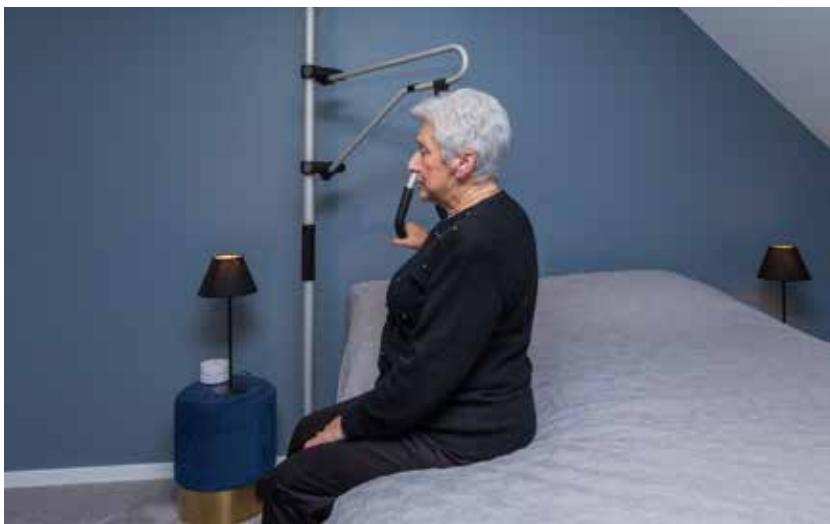

- Ger användaren stöd vid behov
- Ger ökad aktivitets- och delaktighetsnivå
- Avlastning, kan minska belastningsskador
- Ger stöd vid förflyttning i både liggande, sittande, överförflyttningar och stående
- Kan användas som stöd till träningsövningar



## Tillbehör till Gripo

### Dävert



#### Dävert

Inklusive 2 st universalkopplingar 40/22 mm och gummerat hänghandtag. Däverten stöttar vid lägesändring i sängen.

Art. nr.  
35148



#### Dävertrör för sidostöd

Utan hänghandtag. Inklusivt 2 st universalkopplingar 40/22 mm. Längd 68 cm från stängan. Ger ett större stöd på en större yta.

Art. nr.  
35196



## Tillbehör till Gripo Stödräcken

- Monteras mellan två Gripostänger
- Stöd vid av- och påklädning
- Montering efter varandra, som en lång gångbana eller ledstång
- Uppfällbar
- Sned montering, i en liten trapp eller vid andra nivåskillnader
- Universalkopplingar beställs separat



**Stödräcke, 100 cm lång**

Storlek	Art. nr.
22 mm	35321
40 mm	35322



**Stödräcke gummiklädd, 100 cm lång**

Storlek	Art. nr.
22 mm	35323



**Stödräcke, 160 cm lång**

Storlek	Art. nr.
40 mm	35152



## Tillbehör till Gripo



### Uppfällbar sits

Inklusive universalkoppling 40/40 mm. Bredd 36 cm, djup 40 cm. Max brukarvikt 110 kg.

Art. nr.  
35154



### Armstöd, sidostöd

Uppfällbar. Inklusiv 2 st universalkopplingar 40/40 mm. Bredd mellan armstöd 56 cm. Ändring av mening: Kan kombineras med uppfällbar sits eller användas som stöd vid t.ex. på- och avklädning.

Art. nr.  
35255





## Tekniska krav och detaljer

Gripo	
Krav till takhöjd:	Mindre än 210 cm-max 340 cm
Krav på takkonstruktion:	Måste tåla punktbelastning på 100 kg
Brukarvikt:	Max 210 kg
Material:	Aluminium och plast
Produktvikt:	4,7 kg utan tillbehör

## Artikelnummer

### Gripo

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35200	Gripo	För takhöjd 210-300 cm Max brukarvikt 210 kg
35202	Gripo Special	För takhöjd lägre än 210 cm Max brukarvikt 210 kg
35210	Gripo Lång. Har 15 cm extra höjd på stängan för montering av tillbehör högre upp än på övriga.	För takhöjd 260-340 cm Max brukarvikt 210 kg

### Multigrepp

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35315	Kan roteras 360 grader runt stängan. Med rotationsfäste.	44,5 cm handtag ut från stängan. Max brukarvikt 110 kg.



# Artikelnummer

## Cirkulärt grepp

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35281	Ger användaren möjlighet att förflytta sig runt stången med en fast stödpunkt hela tiden. Inklusive 2 st universalkopplingar.	Cirkulärt grepp D30 (30 cm) Max brukarvikt 110 kg
35280	Ger användaren möjlighet att förflytta sig runt stången med en fast stödpunkt hela tiden. Inklusive 2 st universalkopplingar.	Cirkulärt grepp D40 (40 cm) Max brukarvikt 110 kg



## Dävert

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35148	Inklusive 2 st universalkopplingar 40/22 mm, hängande gummerat handtag med band.	68.5 cm ut från stången. Max brukarvikt 110 kg



## Dävert för sidostöd

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35196	Dävertrör inklusive 2 st universalkopplingar 40/22 mm.	68.5 cm ut från stången. Max brukarvikt 110 kg



## Triangelhandtag

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35145	Inklusive universalkoppling 40/22 mm och gummerat handtag.	Rördiameter 22 mm Max brukarvikt 150 kg



## Kombigrepp

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35208	Inklusive 2 st universalkopplingar 40/22 mm och gummerat handtag.	Höjd 24 cm, längd 30 cm Rördiameter 22 mm Max brukarvikt 150 kg



## Tvåhandsgrepp

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35159	Inklusive universalkoppling 40/22 mm och gummerat handtag.	Rörlängd 48 cm Rördiameter 22 mm Max brukarvikt 150 kg



## Vertikalt minigrepp

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35158	Inklusive 2 st universalkopplingar 40/22 mm.	Rördiameter 22 mm Längd 75 cm Max brukarvikt 150 kg



## Stödräcke

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35321	Universalkoppling beställs separat.	Längd 100 cm, rördiameter 22 mm Max brukarvikt 150 kg
35322	Universalkoppling beställs separat.	Längd 100 cm, rördiameter 40 mm Max brukarvikt 150 kg
35323	Gummerad yta. Universalkoppling beställs separat.	Längd 100 cm, rördiameter 22 mm Max brukarvikt 150 kg
35152	Universalkoppling beställs separat.	Specifikationer: Längd 160 cm, rördiameter 40 mm. Max brukarvikt 150 kg



# Artikelnummer

## Uppfällbart sits

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35154	Uppfällbar. Sits av plast. Inklusive universalkoppling 40/40 mm	Bredd 35 cm, djup 40 cm Max brukarvikt 110 kg

## Armstöd, Sidostöd

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35255	Uppfällbara. Gummiklädda handtag. Inkl 2 st universalkopplingar 40/40 mm.	Bredd mellan armstöden 56 cm Max brukarvikt 150 kg

## Takplatta för sneda tak

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35320	Ska skruvas i tak. Skruvar medföljer ej.	Reglerbar efter takets lutningar.

## Takplatta special, för svaga tak

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35153	Stor oval takplatta, räcker över två reglar.	70 x 31 cm

## Mjukt grepp

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35298	Ger ett bättre grepp. Fästes med blixtlås runt stängan.	Längd 20 cm För rördiameter 40 mm

## Halkskyddsplatta

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35007	Bottenplatta med gummerad botten. Används vid montering i våtutrymmen med mycket stänk eller på hårda laminatgolv.	Diameter 20 cm

## Toalettrullehållare

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
11456	Toalettrullehållare med avrivare. Inklusive universalkoppling 40/22 mm.	

## Väggfäste

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35156	Mottagare för stödräcke. Skruvas i vägg.	För rördiameter 22 mm
35157	Mottagare för stödräcke. Skruvas i vägg.	För rördiameter 40 mm

## Universalkoppling fasta lägen

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35130	Standard, med tandbricka	Diameter 40/22 mm
35169	Med tandbricka	Diameter 40/40 mm
35199	Med tandbricka	Diameter 22/22 mm
35277	Med tandbricka	Diameter 22/40/22 mm

## Universalkoppling med fri rotation, till bl.a. uppfällbart räcke

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35160	Utan tandbricka	Diameter 40/22 mm
35166	Utan tandbricka	Diameter 40/40 mm

## Universalkoppling med mottagare

Art. nr.	Beskrivning	Specifikationer
35161	Med mottagare för uppfällbart räcke.	Diameter 40/22 mm
35167	Med mottagare för uppfällbart räcke.	Diameter 40/40 mm





# Hjälpmedel för en fungerande och självständig vardag.

Marknadens  
bredaste sortiment  
av produkter för  
tillgängliga badrum  
och kök



Lift Easy



Balance



Svängbart tvättställ



Bidette spol- och torksits



Ropox kökskoncept

I snart 30 år har vi på Svancare sett till att utveckla hjälpmedel som kan öka livskvaliteten och bibehålla funktionsnivå hos användaren. Drivkraften i att kunna göra skillnad i vardagen ger oss lust att fortsätta utveckla nya produkter. Det gör vi hela tiden.



Scanna koden för att läsa mer om våra produkter.



0240-101 02 | [info@svancare.se](mailto:info@svancare.se)

**SVANCARE**<sup>®</sup>  
- A PART OF AddLife

[svancare.se](http://svancare.se)