

Lift Easy

Toalettlyft som hjälper till i vardagen

"För en säker
förflyttning i
badrummet"






Lift Easy – trygg förflyttning till och från toalettstolen

Vår Lift Easy är ett omtyckt hjälpmedel hos användare som är i behov av hjälp vid förflyttning till och från toalettstolen. Lift Easy är batteridrivnen och sitsen kan användas i både plant och tiltat läge, 8 graders lutning, vilket ger ett tryggt stöd från sittande till stående, samt vid låga förflyttningar.

Tack vare den goda lyfthöjden blir stödet säkert och stabilt hela vägen. Lift Easy är enkel att installera och använda. Den är dessutom IP-klassad så att man kan duscha av sig medan man sitter kvar på den. Lift Easy fungerar utmärkt tillsammans med Svancares spol- och torktillsats Bidette.

Förflyttningar med Lift Easy

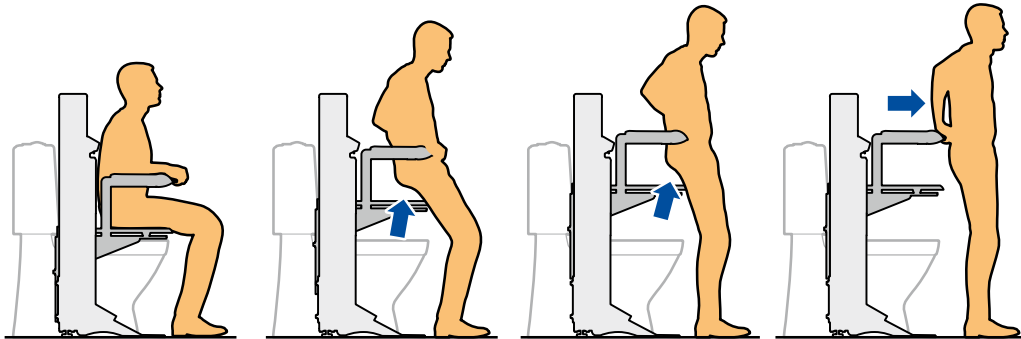


Från sittande till stående

När Lift Easy är i sitt nedersta läge är sitsen plan oavsett inställning. Sitsen går att ställa i ett koxitläge och det kan underlätta uppresning då lutar sitsen något framåt. Vägen upp till stående blir då behagligt



fölsam för kroppen samtidigt som användaren hela tiden har golvkontakt. På samma sätt används Lift Easy när användaren ska förflyttas från stående till sittande.

Låg förflyttning

Vid en låg förflyttning, tex från en rullstol, låses sitsen i plant läge. Vik sedan upp armstödet och ställ in sitsen till den höjd som gör förflyttningen mest bekväm och enkel.

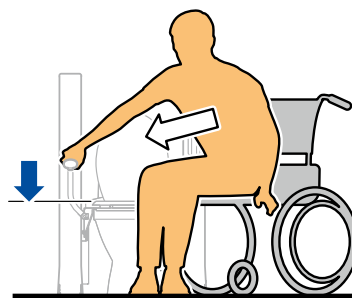


Från rullstol till Lift Easy

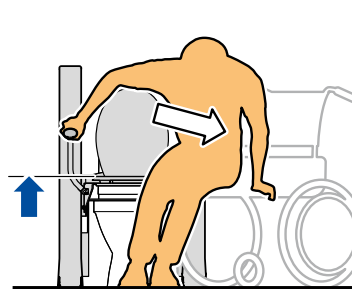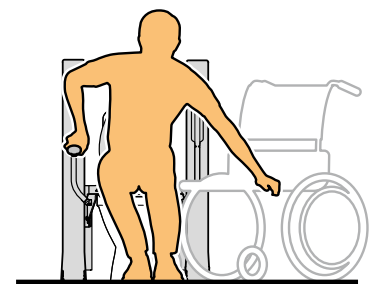

Från Lift Easy till rullstol



Lift Easy monterad på vägghängt toalettporcelain

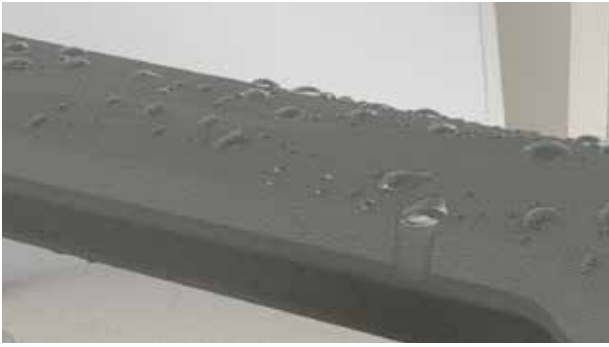

Vattensäker

Lift Easy är vattensäker och användaren kan sitta kvar på toaletten för att duschas vid behov.



Lätt att använda

Lätt och pedagogisk att använda tack vare genomtänkt hand- och fotkontroll.



Vårdarstyrning

Lift Easy kan enkelt höjas och sänkas efter användarens behov och följa med i hela förflyttningen. Förutom styrning via handkontroll finns det inbyggda knappar på den ena pelaren så att en vårdare eller anhörig enkelt kan hjälpa till vid behov.



Löstagbart batteri


Lift Easys batteri går att laddas direkt i ett eluttag hela tiden men går också att ta bort och laddas på annat ställe. Det innebär att man inte behöver anpassa badrummet med ett eluttag.



Funktioner

- Går att använda till både vägghängd och golvporcelain, med eller utan cistern.
- Väl tilltagen lyfthöjd (95 cm)
- Sitsen kan användas både i plant och vinklat läge.
- Uppfällbara armstöd som följer med ända upp.
- Enkel att installera.
- Lätt att rengöra.
- Löstagbart batteri.
- Kan kombineras med Bidette.

Måttskiss Lift Easy (mm)

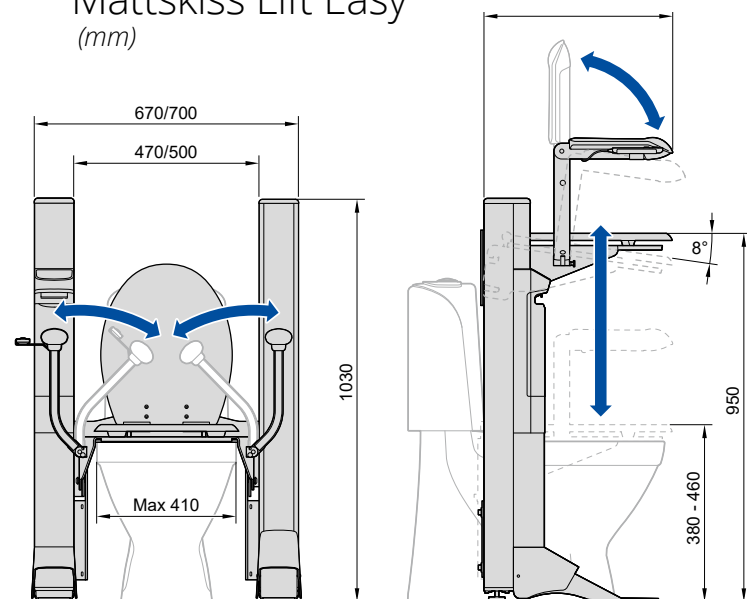

Detta ingår i standard:

- ▶ Handkontroll
- ▶ Fäste handkontroll
- ▶ Batteri
- ▶ Montagekitt

Teknisk info

Bredd, höjd, djup:	670x1020x500 mm
Driftspänning:	24 VDC (Batteri)
Täthetsklass:	IPx6
Max lyftkapacitet:	200 kg
Max lyfthöjd över golv:	950 mm

Produkten är CE-märkt enligt MDR 2017/745

TILLBEHÖR



MJUKSITS

ART. NR. 10 399

Innermått B. 210 mm
Innermått L. 245 mm



HÅLFÖRMINSKARE

ART. NR. 10 046

B. 170 mm, L. 262 mm
Mellan, plan.



TOALETTSITS

ART. NR. 11 904

Vit med mjukstängning.



EXPANDER

ART. NR. 11 906

Till toaletter som inte har genomgående hål.



TOALETRULLE- HÅLLARE

ART. NR. 11 495



FOTKONTROLL

ART. NR. 10 865

Platta: 291x190 cm
knapphöjd: 25 mm



LADDSTATION

ART. NR. 11 792

Kombinationer och anpassningar

Samtliga av Svancares produkter är framtagna med tanken om att de ska kunna anpassas och kombineras så att användaren kan använda de hjälpmedel som behövs



BIDETTE R3

ART. NR. 11 122

Kompletteras med anpassningsats;
Art. nr 11 248

FOTKONTROLL TILL LIFT

ART. NR. 10 865

ANVÄNDNING: Kontaktplattan ansluts till uttaget för handkontroll. En kontakt på plattan används för att höja sitsen på Lift Easy, och den andra för att sänka sitsen.

STORLEK: Plattan är 291x190 cm. Tydlig markering/pil upp och ned, inristat i plattan. Höjd på knapparna är 25 mm. Undersidan som ligger an mot golvet är antihalk-belagd.



Hjälpmedel för en fungerande och självständig vardag.

Marknadens
bredaste sortiment
av produkter för
tillgängliga badrum
och kök



Gripo Stödstång



Balance



Bidette spol- och torktillsats



Gaius badrumskoncept



Ropox kökskoncept

I snart 30 år har vi på Svancare sett till att människor med speciella behov kan bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet. Drivkraften i att kunna göra skillnad i vardagen ger oss lust att fortsätta utveckla nya produkter. Det gör vi hela tiden.



Scanna koden för att läsa mer om våra produkter.



0240-101 02 | info@svancare.se

SVANCARE[®]
- A PART OF AddLife

svancare.se